

يسهل جهاز قياس أكيو-تشيك جايد الكثير من الأمور.

إجراء قياس السكر في الدم



إدخال أشرطة الاختبار

أدخل أشرطة الاختبار في مكان إدراج أشرطة الاختبار في اتجاه السهم. عند قيامك بتشغيل الجهاز قبل ذلك، فإنك تقوم بتنشيط الإضاءة ألياً.



خلع أشرطة الاختبار

ادفع أشرطة الاختبار من الأمام أو من الخلف بضغط خفيفة تجاه الأعلى. يحظر مس أي جزء من أجزاء أشرطة الاختبار سوى الجانب العلوي.



إخراج أشرطة الاختبار

اخلع أشرطة الاختبار بالضغط على زر إخراج شريط الاختبار أو بنزع شريط الاختبار.



وضع الدم

المس نقطة الدم بالحافة الصفراء لشريط الاختبار وانتظر حتى تظهر "تم إجراء القياس".



زر إخراج أشرطة الاختبار
زر تشغيل/ إيقاف التشغيل
أزرار التنقل عبر القائمة

مكان إدراج أشرطة الاختبار

وستجد المزيد من إرشادات الاستعمال في فيديو المنتج الموجود في الرابط www.accu-chek.de/guide أو ستجدها في نشرة العبوة.

Accu-Chek FastClix. تحتاج فقط لنقرة واحدة لاستخراج الدم.

التحضير

تركيب أسطوانة المشارط



1. اخلع الغطاء
2. إدخال الأسطوانة
3. تركيب الغطاء



أدر الغطاء حتى يكون عمق الوخز المطلوب عند العلامة.

استخراج الدم

ببساطة نقرة واحدة فقط!


نقرة واحدة فقط من أجل الشد والفك



اضغط على زر الإطلاق إلى الأسفل بالكامل، لاستخراج الدم.

المعالجة اللاحقة

إعداد وإزالة أسطوانة المشارط

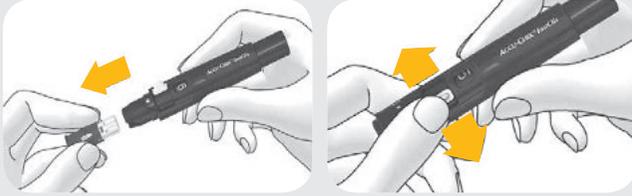

1. حرك الذراع إلى النهاية ناحية الأسفل أولاً، ثم قم بتحريكها مرة أخرى إلى الأعلى.
2. عند الإزالة قم بإزالة الغطاء وإخراج الأسطوانة.



أسطوانة غير مستخدمة

أسطوانة مستخدمة

تنبيه: لا تقم بإزالة أسطوانة المشارط، قبل أن يتم استهلاك جميع المشارط بالكامل. وإذا حدث وتمت إزالتها، فلا يمكن استخدامها مرة أخرى لأسباب صحية.

هل ترغب في معرفة المزيد؟

يسعد موظفونا في مركز خدمة عملاء Accu-Chek بالوقوف بجانبكم!
رقم الهاتف المجاني 0800 4466800 (الاثنين-الجمعة، 08:00 ص – 6:00 م).
أو تفضل بزيارة بوابتنا الإلكترونية على الرابط www.accu-chek.de

ACCU-CHEK®

FASTCLIX و ACCU-CHEK® ACCU-CHEK GUIDE هم علامات تجارية تملكهم Roche.
© Roche Diabetes Care 2018. جميع الحقوق محفوظة.

www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
Mannheim 68305

