



لقنتلا رز

يهي دبلا ناولألا سايقم
(ةساقملا كميق ري سفتل)

لقنتلا رز

جارخإلا رز

لاخدإ ءحتف
ةهجوملا رابتخاللا طيرش



ةحاسمب دوزم رابتخا طيرش
عضول ءارفص
ةبوحسملا مدلا ءني ع

مدلا يف ركسلا ءبسن سايقلا تاوطخ ع برأ



مدلا يلع لوصحلا

مدلا ءرطق زمر ضي مو رهظي ام مدنع
مدلا ءني ع ذخال زخولا ملق مدختسا




رابتخاللا ءطرشأ جاردا

نوباصل او ئفادلا ءاملاب كيدي لسغا
سايقلا يف ءدبلا لبق آديج امه فحو
موقت ام مدنع سايقلا زاهج ليغشت م تي
زاهجالا يف رابتخاللا طيرش جاردا



رابتخاللا ءجيتن ءءارق

4 نم لقا يف رابتخاللا ءجيتن رهظت
مهسلا ريشي. ضرعلا ءشاش يلع ناوئ
يلعأ رابتخاللا ءجيتن تناك اذا ام يل
هنم لقا وأ هلخاد وأ فدهتسملا دملا نم

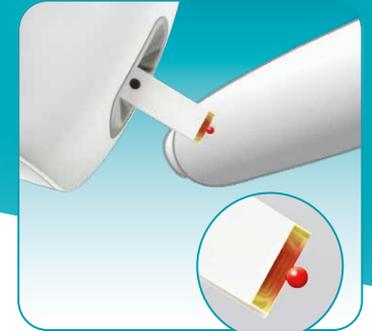

رابتخاللا طيرش يلع مدلا عضو

ءارفصلا ءفاحلا سملا مدلا ءرطق لعجا
نم كعصلا لزا مئ. رابتخاللا طيرشل
زمر ضي مو رهظ درجم رابتخاللا طيرش
ضرعلا ءشاش يلع ءي لم رلا ءءاسلا



دشلا رز

قالطإلا رز

ةيامح ءاطغ

زخولا ةربإ

نارودلل لباق ءاطغ



ACCU-CHEK INSTANT و ACCU-CHEK SOFTCLIX و ACCU-CHEK
علامات تجارية مملوكة لشركة Roche.

Roche Diabetes Care Deutschland, 2021 ةكرش


accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH

Sandhofer Straße 116

68305 Mannheim

ةليلق تاوطخ يف ةفيطل ةقيرطب مدنة ني ع بحس

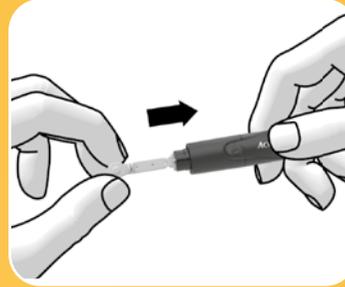

زخولا ةربإ لاخذإ

مٲ ربإلا لماح يف ةديج زخو ةربإ لاخذأ
مٲ زخولا ةربإ نع يقاولا ءاطغلا ل زأ
يرخأ ةرم زخولا ملق ءاطغ بأك




ءاطغلا عزنا

زخولا ملق نع أديعب ءاطغلا عزنا




ريضحتلا

نوباصلالو ئفادلا ءمالاب كيدي لسغا
كيدي ففج مٲ مدلا ةني ع بحس لبق
أديج

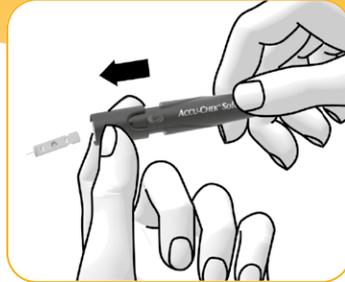


زخولا ةربإ نم صلختلا
ةمدختسملا

فذاقلا ك زخو زخولا ملق نع ءاطغلا عزنا
زخولا ةربإ جارخا مٲ يف ءمالا ل
يرخأ ةرم ءاطغلا بأك مٲ ةمدختسملا

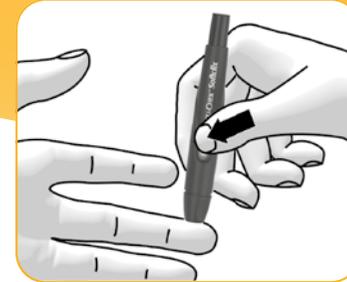

تارطق بحسو زخولا ملق دش
مدلا

امدنعو دشلا رز لىل طغضلا يف رمتسا
نوللا رفاصأ قالطإلا رز طسو نوكي
مادختسالل آزهاج زخولا ملق حبصي
عزوم لىل ةوقب زخولا ملق لىل طغضا
قالطإلا رز لىل طغضا بولطملا زخولا
مدلا بحسل

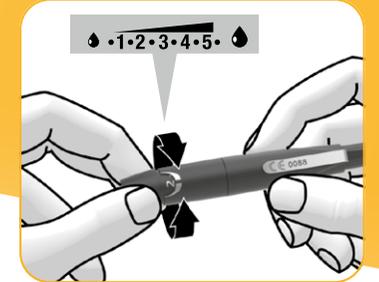

زخولا قمع طبض

لىل 0,5 نم) زخو قمع 11 طبض كنكمي
ةزخولا قمع حبصي يتح ءاطغلا ردا (5,5
ةمالعلا لىل بوغرملا