




- Botón de navegación
- Escala de color intuitiva (para la interpretación de los valores medidos)
- Botón de navegación
- Botón de expulsión
- Ranura para la inserción guiada de la tira reactiva
- Tira reactiva con zona amarilla para la aplicación de la sangre



Cuatro pasos para la medición de la glucemia

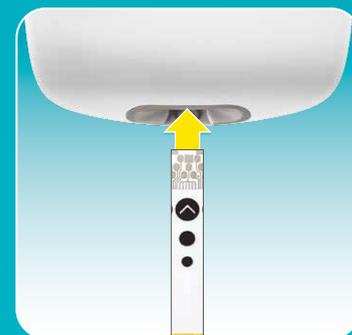


Insertar la tira reactiva

Antes de iniciar la medición, lávese las manos con agua jabonosa caliente y séquelas bien. El medidor se conecta cuando se inserta la tira reactiva en el mismo.



Extraer sangre

Cuando visualice el símbolo de una gota parpadeante, utilice el dispositivo de punción para extraer la prueba de sangre.

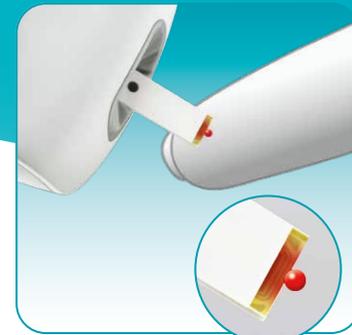

Aplicar la sangre

Toque el borde amarillo de la tira reactiva con la gota de sangre. Retire su dedo de la tira reactiva en el momento en el que visualice el símbolo de un reloj de arena parpadeante en el display.



Leer el resultado de la prueba

El resultado de la prueba se visualiza en el display en menos de 4 segundos. La flecha indica el resultado de la prueba se encuentra por encima, dentro o por debajo de su rango objetivo.



Extracción de sangre suave en pocos pasos




Preparación

Antes de proceder a la extracción de sangre lávese las manos con agua caliente y jabón. Seguidamente, séquese bien las manos.




Extraer el capuchón

Retire el capuchón del dispositivo de punción.

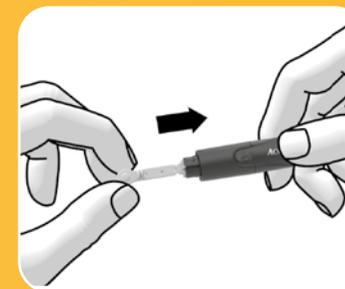

Colocar la lanceta

Coloque una lanceta nueva en el portalancetas. Desenrosque el capuchón protector de la lanceta. Vuelva a colocar el capuchón del dispositivo de punción

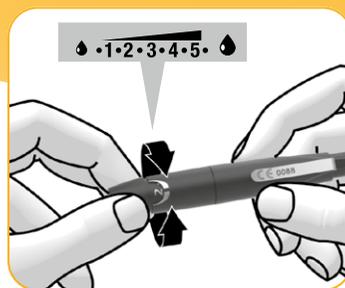

Ajustar la profundidad de la punción

Usted puede ajustar 11 profundidades de punción (0,5 hasta 5,5). Gire el capuchón hasta que la profundidad de punción deseada se encuentre en la marca.



Tensar el dispositivo de punción y extraer la gota de sangre

Presione completamente el botón de tensión. El dispositivo de punción está tensado cuando el centro del botón disparador es de color amarillo. Presione firmemente el dispositivo de punción en el punto de punción deseado. Pulse el botón disparador para extraer sangre.



Expulsar la lanceta utilizada

Retire el capuchón del dispositivo de punción y empuje el expulsador hacia delante. La lanceta utilizada se expulsa. Vuelva a colocar el capuchón.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT y ACCU-CHEK SOFTCLIX son marcas de Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care Deutschland

accu-chek.de
 Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
 Sandhofer Straße 116
 68305 Mannheim