

# Аccu-Chek Aviva Connect. Глюкометр – устройство, которое объединяет.



Дополнительные указания по обращению содержатся в видеоматериалах к изделию по адресу [www.accu-chek.de/connect](http://www.accu-chek.de/connect) или во вкладыше-инструкции.

## Порядок измерения уровня сахара в крови



### Ввести тест-полоску

Вставьте тест-полоску в тест-порт глюкометра в направлении, указанном стрелкой; глюкометр включается. На дисплее отобразится текст *Messung wird vorbereitet* (Подготовка к измерению).



### Взять кровь

После того, как на дисплее отобразится текст *Tropfen auftragen* (Нанести каплю крови), проколите боковую сторону кончика пальца и выдавите каплю крови (краткие инструкции на оборотной стороне устройства).



### Нанести кровь

Легонько коснитесь края капли тест-полоской. Не наносите кровь на верхнюю поверхность тест-полоски. После того, как тест-полоска впитает достаточное количество крови, на дисплее отобразится текст *Messung wird durchgeführt* (Измерение производится).



### Установка маркера результата измерения

Результат измерения выводится на верхнюю часть дисплея. Для установки маркера полученного результата нажмите кнопку ОК: на дисплее отобразится текст *Markierung* (Маркер). Для выбора необходимого маркера нажмите кнопку «Вверх» и «Вниз», затем для подтверждения нажмите кнопку ОК.


При желании полученные данные могут быть перенесены в приложение Accu-Chek Connect в вашем смартфоне.

# Accu-Chek FastClix. Забор крови всего 1 нажатием.

## Подготовка

Установить барабан с ланцетами

Снять колпачок

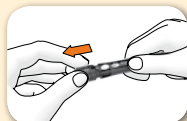

Ввести барабан




Надеть колпачок



## Отрегулировать глубину прокалывания

Поворачивать колпачок, пока отметка не укажет на нужную глубину прокалывания

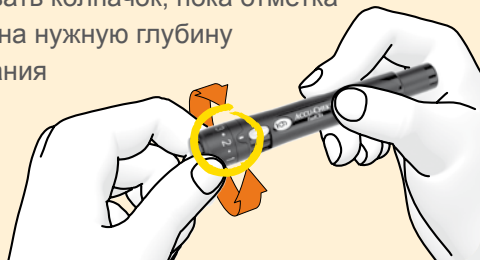


## Забор крови: всего 1 нажатие!

Взять кровь

Надавать на спусковую кнопку до упора


**Всего 1 нажатие**  
для зажима и приведения в действие

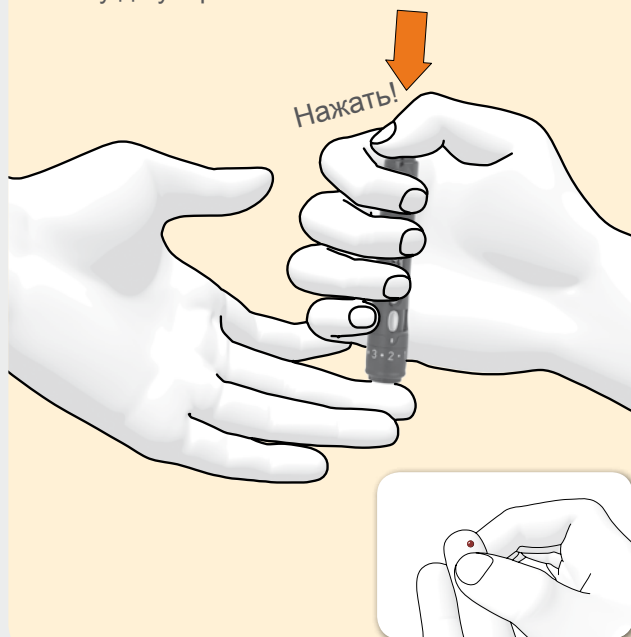

## После использования

Подготовить новый ланцет

Переместить рычаг до упора в направлении А и снова в направлении В

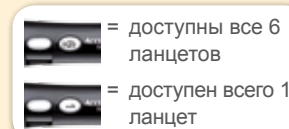

= доступны все 6 ланцетов

= доступен всего 1 ланцет

Удалить использованный барабан

Снять колпачок и извлечь барабан



Использованные барабаны можно узнать по красной полосе. После извлечения их более нельзя установить снова, даже если один или все шесть ланцетов ещё не использованы.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK CONNECT и FASTCLIX являются торговыми марками компании Roche.  
© 2016 Roche Diabetes Care. Все права защищены.

## Хотите узнать больше?

Наши сотрудники в Центре обслуживания клиентов Accu-Chek помогут Вам!  
**Бесплатный телефон 0800 4466800** (пн–пт, 08:00–18:00).  
Вы также можете посетить наш онлайн-портал по адресу [www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)



[www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)  
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim

**ACCU-CHEK®**