

Kurzanleitung Accu-Chek® Aviva Expert



1. Blutzuckermessung ohne Bolusberechnung




Teststreifen in Pfeilrichtung einführen.



Gewinnen Sie einen Blutstropfen mit der Stechhilfe.




Blutstropfen auftragen.

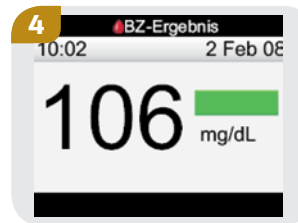


Das Ergebnis wird im Display angezeigt.

2. Blutzuckermessung mit Bolusberechnung

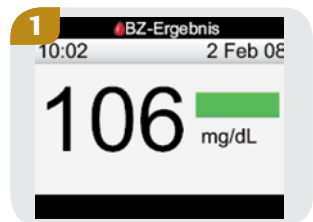


Führen Sie die Blutzuckermessung durch.

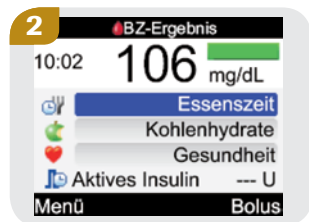

3 Sekunden später erscheint die Anzeige.


Geben Sie die Angaben zu

- Essenszeit
- Kohlenhydrate und
- Gesundheit ein.

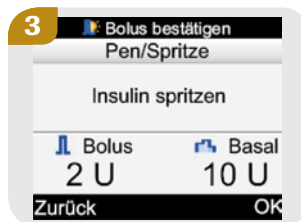


Die berechnete Bolusmenge wird auf dem Display des Messgeräts angezeigt.


3. Bolusrechner-Wegweiser

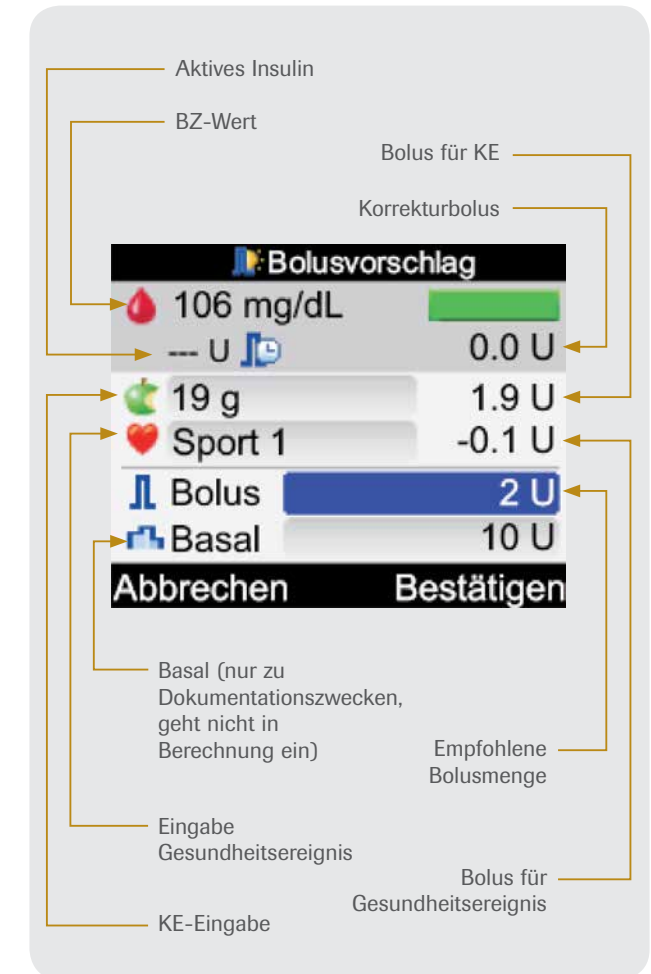


4. Datenauswertung im Accu-Chek Aviva Expert

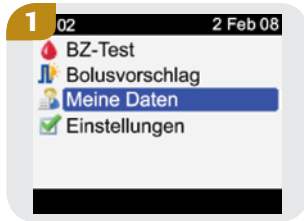

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „**Meine Daten**“.

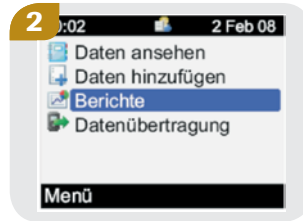


Wählen Sie „**Berichte**“.

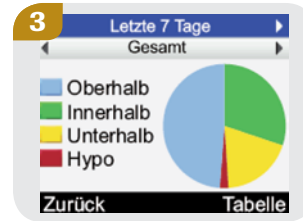

Beispiel: Zielbereichgrafik (BZ-Werte letzte 7 Tage).


Zeitpunkt	BZ-Wert (mg/dL)	Bolus (g)	Kohlenhydrate (g)
20:06	69		
17:33	126		
16:06	154		
13:52	60		
9:03	397		

Beispiel: Tagebucheintrag (BZ-Werte, Bolus und Kohlenhydrate).

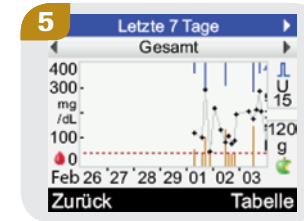

Beispiel: Trendgrafik (letzte 7 Tage).

5a. Datenübertragung auf einen Computer mit Accu-Chek Smart Pix

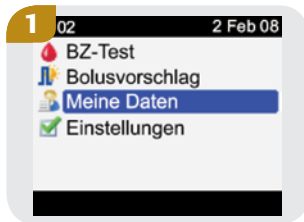

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „**Meine Daten**“.



Wählen Sie „**Datenübertragung**“.




Legen Sie Accu-Chek Aviva Expert vor das Accu-Chek Smart Pix Datenauslesegerät. Das Auslesen startet automatisch.




Nach dem Auslesen öffnet sich der Gesamtverlauf. Weitere Ansichten sind möglich und können ausgedruckt oder abgespeichert werden.


5b. Datenübertragung in das Accu-Chek Connect Onlineportal

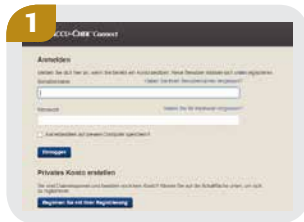

Erstellen Sie sich unter www.accu-chek-connect.de ein privates Konto, indem Sie auf „**Beginnen Sie mit Ihrer Registrierung**“ klicken.

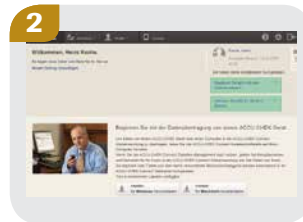

Nach erfolgreicher Registrierung installieren Sie die Accu-Chek Connect Geräteschnittstelle auf Ihrem Computer.

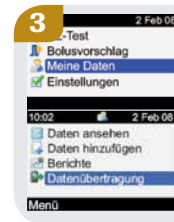

Bitte folgen Sie den Anweisungen 1–3 aus der Anleitung „5a. Datenübertragung auf einen Computer mit Accu-Chek Smart Pix“.



Die Accu-Chek Connect Geräteschnittstelle öffnet sich. Geben Sie Ihre Accu-Chek Connect Benutzerdaten ein und bestätigen Sie mit „**Weiter**“.



Nach der Datenübertragung können Sie im Accu-Chek Connect Onlineportal Ihre Blutzucker-Berichte ansehen.



www.accu-chek.de
 Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
 Sandhofer Straße 116
 68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK CONNECT und ACCU-CHEK SMART PIX sind Marken von Roche.
 © 2016 Roche Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten.

ACCU-CHEK®