

Ассу-Чек Aviva. Комфортная безопасность.



Порядок измерения уровня сахара в крови



1 Ввести тест-полоску

Введите тест-полоску в прибор в направлении стрелки так, чтобы раздался звуковой сигнал. После этого появляется мигающий символ капли крови.



2 Взять кровь

Ручкой для прокалывания заберите каплю крови с боковой поверхности пальца (краткая инструкция на обратной стороне).



3 Нанести кровь

Прикоснитесь к капле крови концом тест-полоски. Не наносите каплю на верхнюю сторону тест-полоски. Если раздался звуковой сигнал и начали мигать песочные часы, значит тест-полоска получила достаточное количество крови.



4 Считать результат измерения

Спустя 5 секунд на дисплее появится результат измерения. Прибор выключается автоматически, как только вытаскивается полоска.


Дополнительные указания по обращению содержатся в видеоматериалах к изделию по адресу www.accu-check.de/aviva или во вкладыше-инструкции.

Accu-Chek FastClix. Забор крови всего 1 нажатием.

Подготовка

Установить барабан с ланцетами

Снять колпачок

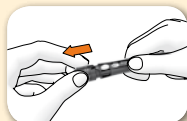

Ввести барабан




Надеть колпачок



Отрегулировать глубину прокалывания

Поворачивать колпачок, пока отметка не укажет на нужную глубину прокалывания

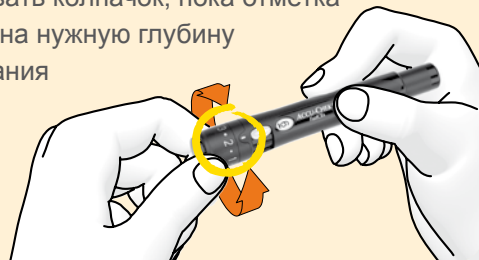


Забор крови: всего 1 нажатие!

Взять кровь

Надавать на спусковую кнопку до упора



Всего 1 нажатие
для зажима и приведения в действие

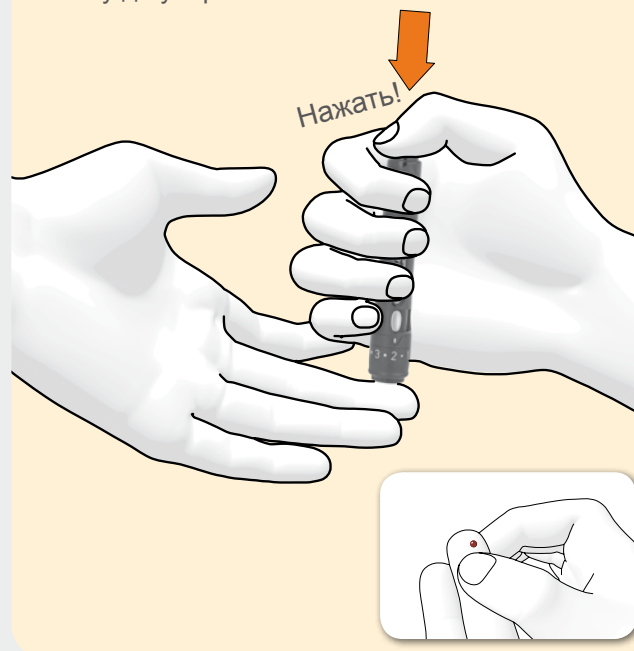

После использования



Подготовить новый ланцет

Переместить рычаг до упора в направлении А и снова в направлении В

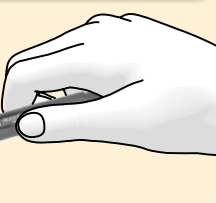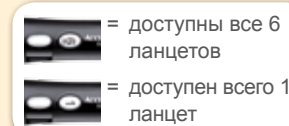

Удалить использованный барабан

Снять колпачок и извлечь барабан

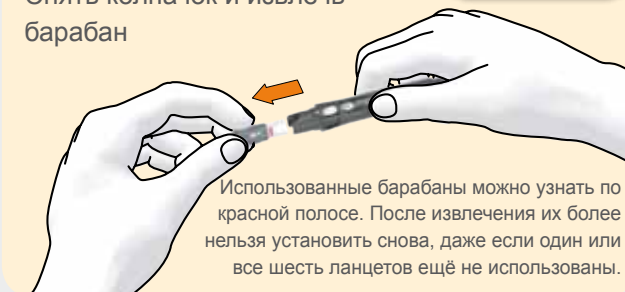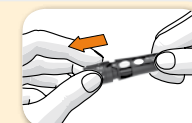

Использованные барабаны можно узнать по красной полосе. После извлечения их более нельзя установить снова, даже если один или все шесть ланцетов ещё не использованы.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA и FASTCLIX являются торговыми марками компании Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Все права защищены.

Хотите узнать больше?

Наши сотрудники в Центре обслуживания клиентов Accu-Chek помогут Вам!
Бесплатный телефон 0800 4466800 (пн–пт, 08:00–18:00).
Вы также можете посетить наш онлайн-портал по адресу www.accu-chek.de



www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®