

# Accu-Chek Aviva. Tako je dobro osećati se sigurno.



Dodatna uputstva za rukovanje možete naći na videu o proizvodu pod [www.accu-chek.de/aviva](http://www.accu-chek.de/aviva) ili u uputstvu priloženom ambalaži.

## Merenje šećera u krvi



### Uvlačenje test trake

Test traku u smeru strelice uvlačite u meri uređaj dok se ne oglasi signalni ton. Javlja se trepćući simbol u vidu kapi krvi.



### Nanošenje krvi

Krajem test trake dodirnete kap krvi. Krv nemojte da nanosite na gornju stranu test trake. Čim se začuje signalni ton i peščani sat počne da trepće, to je znak da je test traka upila dovoljno krvi.



### Vađenje krvi

Priborom za ubadanje ubodite bočnu stranu prsta da se formira jedna kap krvi (kratko uputstvo na poleđini ovog lista).



### Očitavanje izmerene vrednosti

Na displeju se posle 5 sekundi pojavljuje izmerena vrednost. Aparat za merenje šećera će se automatski isključiti, kada test traka biće izvađena.

# Accu-Chek FastClix. Samo 1 klik i krv je spremna za analizu.

## Priprema za merenje

Umetanje bubnja sa lancetama



Skinite poklopac



Ubacite bubanj



Stavite poklopac



## Podešavanje dubine uboda

Okrećite poklopac dok se na pokazivaču ne pojavi željena dubina uboda




## Vađenje krvi: jednostavno samo 1 klik!

### Vađenje krvi

Do kraja pritisnite dugme za okidanje


**Samo 1 klik**  
za zatezanje i  
okidanje

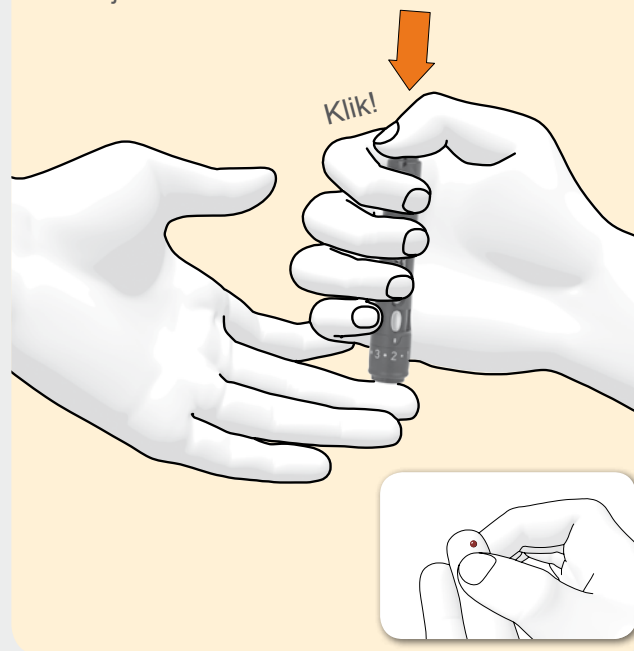

## Posle merenja


### Priprema nove lancete

Polugu pomerite do graničnika u smeru A i onda nazad u smeru B

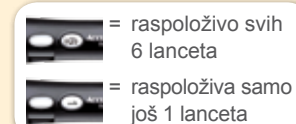

### Uklanjanje iskorišćenog bubnja sa lancetama

Skinite poklopac i izvucite bubanj

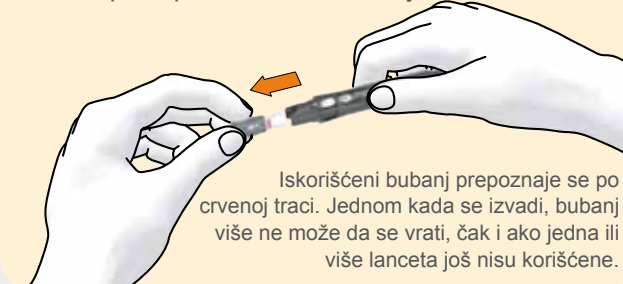

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA i FASTCLIX su zaštićeni žigovi kompanije Roche.  
© 2016 Roche Diabetes Care. Sva prava zadržana.

## Želite još informacija?

Naši saradnici u Accu-Chek korisničkom servisu su Vam na raspolaganju!  
**Besplatni broj telefona 0800 4466800** (pon-pet, 08:00-18:00 sati).  
Ili posetite našu internet stranicu [www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)



[www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)  
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim

**ACCU-CHEK®**