

ACCU-CHEK® Compact Plus

قياس نسبة الجلوكوز في الدم

يتوفر مع جهاز القياس Accu-Chek Compact Plus بطاريات يتم تركيبها مسبقًا بالإضافة إلى ضبط التاريخ والوقت مسبقًا بالجهاز. سيقوم جهاز القياس Accu-Chek Compact Plus بالتكويد تلقائيًا عند إدخال أسطوانة شرائح الاختبار.

قياس نسبة الجلوكوز في الدم

إدخال أسطوانة شرائح الاختبار أو استبدالها

1 اسحب زر الاختبار لأسفل حتى يتم إخراج شريحة الاختبار المستخدمة.



1 افتح غطاء الجزء الخاص بأسطوانة شرائح الاختبار.



2 أمسك جهاز القياس بحيث تكون شريحة الاختبار متجهة إلى أسفل. اجعل نقطة الدم تلمس الطرف الأمامي من شريحة الاختبار حيث يوجد تجويف أسود اللون. تبدأ شريحة الاختبار في سحب الدم.




2 اضغط على الزر الأحمر لتحرير أسطوانة شرائح الاختبار.



3 قم بإمالة جهاز القياس إلى الأمام بحيث تخرج أسطوانة شرائح الاختبار من مكانها.



3 انظر قراءة جهاز القياس على الشاشة.

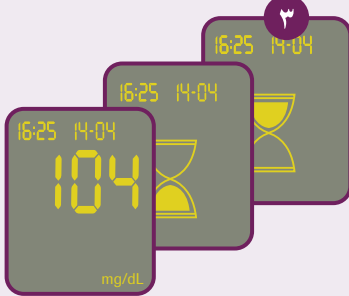

4 اسحب زر الاختبار الرئيسي لأسفل لدفع



4 أدخل أسطوانة شرائح اختبار جديدة.



ACCU-CHEK® Softclix Plus

يمكن فصل قلم أخذ العينة Accu-Chek® Softclix Plus من جهاز القياس Accu-Chek Compact Plus باستخدام زر التمرير الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز، أو استخدامه بدون فصله.



قم بإعادة الغطاء إلى قلم أخذ العينة. يدخل الغطاء في مكانه تمامًا وتسمع صوتًا لذلك.



قم بإزالة غطاء قلم أخذ العينة.



قم بلف الغطاء الموجود في الجزء السفلي حتى يتم إعداد الموضع الذي تريده (من إجمالي ١١ إعدادًا).



اضغط على المكبس الموجود أعلى قلم أخذ العينة لإخراج الواخزة المستخدمة.



اضغط المكبس لأسفل حتى النهاية. يرجع المكبس ثلث المسافة تقريبًا. وبذلك يكون قلم أخذ العينات جاهزًا للاستخدام.



قم بوضع واخزة جديدة في حامل الواخزات وادفعها حتى تدخل في مكانها تمامًا.



ضع قلم أخذ العينة على المكان الذي سيتم أخذ العينة منه، ثم اضغط لأسفل على المكبس الموجود في أعلى قلم أخذ العينة حتى يتم الحصول على العينة.



قم بإزالة الغطاء الواقعي من الواخزة عن طريق لفه.



تم تصميم قلم أخذ العينة Accu-Chek Softclix Plus للمراقبة الذاتية لنسبة الجلوكوز في الدم لمرضى واحد فقط. ويجب ألا يتم استخدامه لسحب عينات الدم من العديد من المرضى لأنه لا يتضمن أية خصائص تحمي من انتقال العدوى.

لا يحل مخطط التشغيل هذا محل دليل المستخدم الشامل لنظام قياس نسبة الجلوكوز في الدم Accu-Chek Compact Plus. الرجاء التأكد من قراءة ملاحظات السلامة الموجودة في دليل المستخدم.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.