

ACCU-CHEK® Compact Plus

Изследване на кръвната захар

Глюкомерът Accu-Chek Compact Plus се доставя с предварително инсталирани батерии и предварително настроени дата и час.

Глюкомерът Accu-Chek Compact Plus ще се кодира автоматично при поставяне на барабана с тест ленти.

Поставяне и смяна на барабана с тест ленти



1 Отворете капака на отделението за барабана.



2 Натиснете червения бутон за освобождаване на барабана.



3 Наклонете глюкомера напред, за да изпадне барабанът с тест ленти.



4 Поставете нов барабан с тест ленти.


Изследване на кръвната захар



1 Издърпайте надолу централния тест бутон, за да освободите тест лента.



2 Дръжте глюкомера по такъв начин, че тест лентата да сочи надолу. Допрете капката кръв до предния край на тест лентата, където се намира черната вдлъбнатина. Тест лентата ще поеме кръвта.

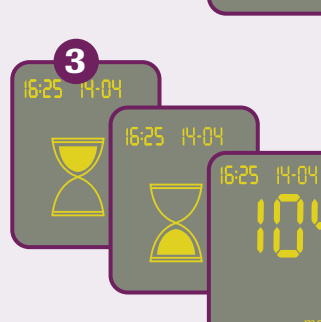

3 За отчитане на глюкомера вижте дисплея.



4 Издърпайте надолу централния тест бутон, за да изхвърлите използваната тест лента.

ACCU-CHEK® *Softclix Plus*

Убождащото устройство Accu-Chek Softclix Plus може да бъде разединено от глюкомера Accu-Chek Compact Plus с помощта на приплъзващия бутон в задната част на глюкомера, или може да се използва както е прикрепено.



1 Отстранете защитната крайна капачка от убождащото устройство.



2 Натиснете буталото в края на убождащото устройство, за да изхвърлите използвания ланцет.



3 Плъзнете новия ланцет в държача за ланцети и го натиснете докато щракне на място.



4 Отстранете защитната крайна капачка от ланцета с въртеливо движение.



5 Натиснете защитната крайна капачка обратно върху убождащото устройство. Капачката щраква на място.



6 Завъртете защитната крайна капачка до желаната настройка на дълбочината (общо 11 настройки).



7 Натиснете буталото надолу докрай. Буталото се връща обратно приблизително на една трета от разстоянието. Сега убождащото устройство е заредено.



8 Поставете убождащото устройство на избраното място за изследване, натиснете буталото в края на убождащото устройство отново надолу докато щракне, за да получите проба.

Убождащото устройство Accu-Chek Softclix Plus е предназначено за самоконтрол само на един пациент. То не трябва да се използва за вземане на кръв от много пациенти, тъй като няма възможности за предпазване от кръстосано заразяване.

Тази диаграма за работа не заменя подробното Ръководство за справки за Вашата система за контрол на кръвната захар Accu-Chek Compact Plus. Моля, прочетете бележките за безопасността, които се съдържат в Ръководството за потребителя.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.