

ACCU-CHEK® Compact Plus

Verensokerin mittaus

Accu-Chek Compact Plus -mittariin on asetettu valmiiksi paristot, päivämäärä ja kellonaika. Accu-Chek Compact Plus koodautuu automaattisesti, kun siihen asettaa testiliuskasyylinterin.

Testiliuskasyylinterin asentaminen ja vaihto



1 Avaa sylinterikotelon kansi.



2 Paina punaista sylinterinirrotusnappia.



3 Kallista mittaria eteenpäin, niin testiliuskasyylinteri putoaa.



4 Aseta mittariin uusi testiliuskasyylinteri.


Verensokerin mittaus



1 Vedä keskellä olevaa testinäppäintä alas, niin mittarista tulee esiin testiliuska.



2 Pidä mittaria niin, että testiliuska osoittaa alaspäin. Kosketa veripisaralla testiliuskan etureunaa mustan loven kohdalta. Veri imeytyy liuskaan.

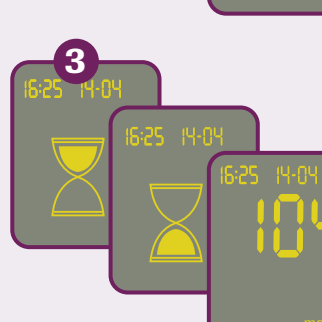

3 Katso tulos näytöstä.



4 Vedä keskellä olevaa testinäppäintä alas, niin käytetty testiliuska irtoaa.

ACCU-CHEK® Softclix Plus

Accu-Chek Softclix Plus -lansettikynän voi irrottaa Accu-Chek Compact Plus -mittarista mittarin takana olevalla liukukytkimellä, mutta sitä voi käyttää myös sen ollessa kiinni mittarissa.



1 Irrota lansettikynän kärkiosa.



5 Paina kärki paikalleen lansettikynään. Sen lukittuessa paikalleen kuuluu napsahdus.



2 Irrota käytetty lansetti painamalla lansettikynän päässä olevaa mäntää.



6 Käännä kärki halua maasi syvyyden kohdalle (vaihtoehtoja on kaikkiaan 11).



3 Työnnä uusi lansetti lansetinpidikkeeseen, ja paina sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.



7 Paina mäntä niin syväälle kuin se menee. Se nousee vain kolmasosan verran takaisin ylös. Nyt lansettikynä on viritetty.



4 Irrota lansetin suojakappale kiertämällä.



8 Paina lansettikynä valitsemaasi pistokohdan, ja ota näyte painamalla lansettikynän päässä olevaa mäntää uudelleen, kunnes kuuluu napsahdus.

Accu-Chek Softclix Plus -lansettikynä on tarkoitettu potilaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sitä ei saa käyttää monen potilaan verinäytteiden ottoon, koska siinä ei ole minkäänlaista suojaa risti-infektioita vastaan.

Tämä käsittelyohje ei korvaa Accu-Chek Compact Plus -verensokerimittarin varsinaista käyttöohjetta. Muista lukea käyttöohjeesta turvallisuutta koskevat huomautukset.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.