

Ein Blutzuckermesssystem, das Stechhilfe und Teststreifen integriert.

Mobiles Messen in einer Hand. Accu-Chek Compact Plus verbindet die zwei Schritte der Messung zu einem einfachen Vorgang. Automatische Teststreifenbereitstellung und Autocodierung machen die Bestimmung Ihrer Blutzuckerwerte zum Kinderspiel – und mit dem komfortablen Multi-Talent ist das Messen jetzt sogar mit einer Hand möglich.

Vor dem ersten Gebrauch

1 Teststreifentrommel einlegen

- Zum Einlegen einer neuen Teststreifentrommel öffnen Sie zuerst den Trommelfachdeckel des Messgeräts.
- Drücken Sie dann den roten Trommelfreigabe-Knopf.
- Entnehmen Sie die leere Teststreifentrommel und legen Sie eine neue ein.
- Die **Codierung** erfolgt **automatisch**.
- Gebrauchte Teststreifentrommel einfach im Hausmüll entsorgen.



2 Stechhilfe vorbereiten

- Ziehen Sie die Kappe der Stechhilfe ab und lassen Sie eine neue Lanzette mit einem hörbaren Klick im Lanzettenhalter einrasten.
- Drehen Sie die Schutzkappe der Lanzette ab und setzen Sie die Stechhilfen-Kappe wieder auf.
- Zum Schluss drehen Sie die Kappe auf die gewünschte Stechtiefe.



Messen – mit einer Hand!

3 Starten

- Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie dann gut ab.
- Schalten Sie das Messgerät mit der Test-Taste ein. Kurz darauf wird ein Teststreifen aus der Teststreifentrommel ausgefahren.



4 Klicken

- Stechtiefe einstellen.
- Spannen Sie die Stechhilfe, indem Sie den Bedienknopf bis zum Anschlag durchdrücken.
- Setzen Sie die Stechhilfe seitlich an die Fingerbeere an und drücken Sie erneut den Bedienknopf. Die Lanzette wird ausgelöst.
- Optional können Sie natürlich auch die Stechhilfe vom Gerät abnehmen und wie gewohnt als separate Stechhilfe nutzen.



5 Messen

- Blutstropfen mit der schwarzen Kerbe an der Vorderseite des Teststreifens aufnehmen.
- **Wichtig:** Das Messgerät muss senkrecht gehalten werden, damit der Teststreifen senkrecht nach unten zeigt.
- Nach ca. fünf Sekunden erscheint Ihr Messwert in der Displayanzeige.
- Durch erneutes Drücken der Test-Taste wird der benutzte Teststreifen ausgeworfen.
- Wenn die 17 Teststreifen einer Trommel aufgebraucht sind, wechseln Sie die Trommel in der unter „Teststreifentrommel einlegen“ beschriebenen Weise aus.



Weitere Details entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Accu-Chek Compact Plus Blutzuckermesssystems.

ACCU-CHEK® Compact Plus

Auszug der wichtigsten Anzeigensymbole und Fehlermeldungen



Das Gerät lässt sich nicht einschalten, weil:

- die Batterien leer sind.
- es zu kalt ist.
- das Gerät defekt ist.



Messbereich

- „HI“: Der Messwert liegt oberhalb des Messbereichs von 600 mg/dl (33,3 mmol/l).
- „LO“: Der Messwert liegt unterhalb des Messbereichs von 10 mg/dl (0,6 mmol/l).



90-Tage-Aufbrauchfrist

Die 90-tägige Aufbrauchfrist der Teststreifen-trommel ist abgelaufen. Die Teststreifen sind unbrauchbar. Fehlt das Uhrsymbol, werden Sie darauf hingewiesen, dass das Gerät die 90-Tage-Aufbrauchfrist nicht berechnen kann. Dies geschieht, wenn:

- Sie eine angebrochene Teststreifentrommel eingesetzt haben.
- Sie das Trommelfach geöffnet haben.
- Sie für einen Batteriewechsel länger als zwei Minuten benötigt haben und eine angebrochene Trommel dabei im Messgerät blieb.




Batterie

Die Batterien reichen noch aus für max. 50 Messungen (bei Verwendung von NiMH-Akkus statt Batterien sind deutlich weniger als 50 Messungen möglich). Verschwindet das Symbol nach drei Sekunden, reicht die Stromversorgung für eine Messung nicht mehr aus.




Temperatur

- Wenn ein Messwert sowie das Temperatursymbol erscheint: Die Umgebungstemperatur war während der Messung im Grenzbereich. Der Messwert darf nur zur Orientierung genutzt werden. Für ein sicheres Messergebnis sollte die Messung bei optimaler Temperatur (zwischen +10 und +40 °C) wiederholt werden.

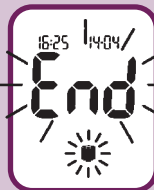


Trommelwechsel

- Die eingelegte Teststreifentrommel ist leer. Bitte legen Sie eine neue Trommel ein.

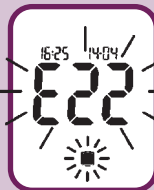

Es ist keine Teststreifentrommel im Gerät.

- Schalten Sie das Gerät mit der Test-Taste aus und setzen Sie eine neue Trommel ein.

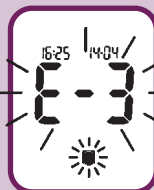


Die Teststreifentrommel dreht sich nicht.

- Schalten Sie das Gerät bitte aus und entnehmen Sie die Teststreifentrommel. Legen Sie sie bitte wieder ein und schließen Sie den Trommelfachdeckel.



Der Teststreifen klemmt oder die Teststreifentrommel dreht sich nicht.

- Schalten Sie das Gerät bitte aus und entnehmen Sie die Teststreifentrommel. Legen Sie sie bitte wieder ein und schließen Sie den Trommelfachdeckel.

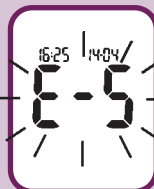

Dieses Symbol erscheint, wenn:

- die Messoptik verschmutzt ist oder sich Kondenswasser im Gerät befindet.
- Sie zu früh oder zu wenig Blut aufgetragen haben. (Alternativ kann die Meldung E-21 erscheinen.) Tragen Sie das Blut erst auf, wenn das Teststreifensymbol erscheint.
- Sie den Teststreifen während der Messung stark verbogen haben.
- Sie das Gerät aus- und wieder eingeschaltet haben und sich der alte Teststreifen noch im Gerät befindet.
- Sie den Teststreifen vor der Messung aus dem Gerät gezogen haben.

Ihr Partner bei Diabetes

Accu-Chek steht für das Angebot umfassender Diabeteslösungen aus einer Hand und für persönliche Beratungs- und Informationsservices. Bei weiteren Fragen rufen Sie bitte unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center an. Gerne stehen wir Ihnen von Mo.–Fr. von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0180/2 00 01 65 (6 Cent pro Gespräch) zur Verfügung. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.accu-chek.de mit vielen kostenlosen Services – informativ und aktuell. Weitere Detailinformationen zum Accu-Chek Compact Plus Blutzuckermesssystem finden Sie ab September 2005 auch unter www.accu-chek.de/compactplus.

ACCU-CHEK und SOFTCLIX sind Marken von Roche.

www.accu-chek.de
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Leben. So wie ich es will.