

ACCU-CHEK® Compact Plus

Oznaczanie zawartości glukozy we krwi

Glukometr Accu-Chek Compact Plus zostaje dostarczony z osadzonymi bateriami, a także z prawidłowymi nastawieniami daty i czasu.

Accu-Chek Compact Plus ulega automatycznemu zakodowaniu z chwilą włożenia bębena z testami paskowymi.

Wkładanie lub wymiana bębna z testami paskowymi



1 Otworzyć pokrywkę wnęki mieszczącej bębenek.



2 Nacisnąć czerwony przycisk zwalniający bębenek.



3 Przechylić glukometr do siebie, co zapewni wypadnięcie bębna.



4 Włożyć nowy bębenek z testami paskowymi.


Oznaczanie zawartości glukozy we krwi



1 Pociągnąć środkowy przycisk w celu uwolnienia paska testowego.



2 Przytrzymać glukometr w taki sposób, aby test paskowy był skierowany w dół. Zetknąć kroplę krwi z przednią krawędzią testu paskowego w miejscu czarnego wycięcia paska. Spowoduje to wchłonięcie krwi przez test.

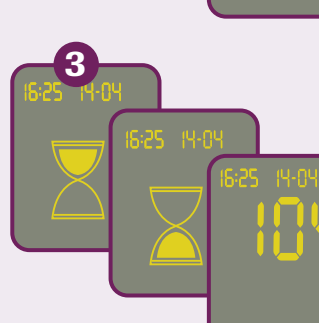

3 Odczytać wskazanie na wyświetlaczu.



4 Pociągnąć środkowy przycisk w celu wypchnięcia zużytego testu paskowego.

ACCU-CHEK® *Softclix Plus*

Nakłuwacz Accu-Chek Softclix Plus można oddzielić od glukometru Accu-Chek Compact Plus za pomocą suwaka usytuowanego z tyłu glukometru lub wykorzystać nakłuwacz bez odłączania go od glukometru.



1 Zdjąć nasadkę z nakłuwacza.



2 Nacisnąć tłoczek na końcu nakłuwacza w celu wypchnięcia zużytego lancetu.



3 Wsunąć nowy lancet w oprawkę lancetu i docisnąć go do słyszalnego zaryglowania.



4 Zdjąć nasadkę ochronną z lancetu przez obrót.



5 Na powrót osadzić nasadkę na nakłuwaczu. Nasadka ulega słyszalnemu zaryglowaniu na swoim miejscu.



6 Nastawić nasadkę przez obrót na wymaganą głębokość nakłucia (łącznie 11 pozycji).



7 Nacisnąć tłoczek do oporu. Tłoczek zostaje wycofany do położenia jednej trzeciej pokonanej drogi. Mechanizm spustowy nakłuwacza jest z tą chwilą naprężony.



8 Przyłożyć nakłuwacz do wybranego miejsca pobrania krwi i nacisnąć tłoczek usytuowany na końcu nakłuwacza do słyszalnego wyzwolenia mechanizmu w celu uzyskania próbki krwi.

Nakłuwacz Accu-Chek Softclix Plus jest przeznaczony do samokontroli podejmowanej przez tylko jedną osobę. Nie wolno go używać do pobierania próbek krwi u wielu pacjentów, ponieważ nie zawiera on zabezpieczeń chroniących przed zakażeniem krzyżowym.

Niniejsza ulotka informacyjna z opisem obsługi nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi użytkowanego glukometru Accu-Chek Compact Plus. Należy koniecznie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa zamieszczone w tej instrukcji obsługi.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.