

ACCU-CHEK[®] Compact Plus

Execução de Testes de glicemia

O aparelho Accu-Chek Compact Plus é fornecido com as pilhas já instaladas e a data e a hora reguladas de fábrica.

O aparelho Accu-Chek Compact Plus codifica automaticamente quando se introduz o rolo de tiras-teste.

Introdução ou substituição do rolo de tiras-teste



1 Abrir a tampa do compartimento do rolo.



2 Premir o botão vermelho de libertação do rolo.



3 Inclinor o aparelho para a frente; o rolo de tiras-teste sai.



4 Introduzir um novo rolo de tiras-teste.


Teste de glicemia



1 Premir o botão de teste central para libertar uma tira-teste.



2 Segurar o aparelho de forma que a tira teste fique virada para baixo. Encostar o bordo dianteiro da tira-teste à gota de sangue, no ponto onde se encontra o entalhe preto. A tira-teste absorve o sangue.

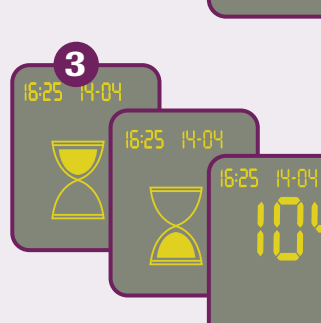

3 Observar o visor para ver o valor.



4 Premir o botão de teste central para ejectar a tira-teste usada.

ACCU-CHEK® *Softclix Plus*

O dispositivo de punção capilar Accu-Chek Softclix Plus pode retirar-se do aparelho Accu-Chek Compact Plus fazendo deslizar o botão que se encontra na parte de trás do aparelho, ou utilizar-se ainda encaixado no aparelho.



1 Retirar a tampa da ponta do dispositivo de punção capilar.



2 Premir o êmbolo que se encontra na ponta do dispositivo de punção capilar para ejectar a lanceta usada.



3 Fazer deslizar uma nova lanceta para dentro do porta-lancetas, e empurrá-lo até encaixar com um estalido.



4 Retirar a tampa de protecção da lanceta com um movimento de rotação.



5 Pressionar novamente a tampa na ponta do dispositivo de punção capilar. A tampa encaixa com um estalido.



6 Rodar a tampa terminal até à regulação de profundidade pretendida (no total, há 11 posições de regulação).



7 Empurrar o êmbolo até ao fim. O êmbolo recua cerca de um terço do curso. O dispositivo de punção capilar já estar armado.



8 Encostar o dispositivo de punção capilar ao local de teste escolhido e empurrar outra vez o êmbolo que se encontra na ponta do dispositivo de punção capilar, até emitir um estalido, para obter uma amostra.

O dispositivo de punção Accu-Chek Softclix Plus destina-se ao autocontrolo de um único doente. Não deve ser utilizado para a colheita de sangue em múltiplos doentes, visto não integrar características de protecção contra o contágio.

Este Gráfico de Instruções não substitui o Manual do Utilizador completo do aparelho de medição da glicemia Accu-Chek Compact Plus. Ler atentamente as notas de segurança contidas no Manual do Utilizador.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.