

# ACCU-CHEK® Compact Plus

## Краткое руководство по использованию глюкометра Ассу-Чек Compact Plus

### Приступая к работе

**Внимание!** Обязательно прочтите подробную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные указания по обращению с прибором, а также дополнительная информация.



### 1. Приступая к работе

- Для вставки кассеты с новой лентой откройте крышку отсека измерительного прибора. После этого нажмите красную кнопку удаления кассеты.

Достаньте пустую кассету и вставьте новую.

- **Кодирование** производится **автоматически**.
- Использованную ленточную кассету утилизируйте как бытовые отходы.



### 2. Подготовка устройства для прокалывания пальца

- Снимите крышку устройства для прокалывания пальца и установите новый прокалыватель. При установке нового ланцета должен раздаваться слышимый щелчок.
- Отвинтите защитную крышку прокалывателя и закройте крышку устройства для прокалывания пальца.
- В заключение отрегулируйте крышку под нужную глубину прокалывания.

### Измерение – рукой



### 3. Запуск

- Вымойте и хорошо высушите руки.
- Включите прибор, нажав кнопку Test. Через некоторое время из ленточной кассеты наружу выйдет тестовая полоска.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK COMPACT PLUS and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.

[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)  
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim



**ACCU-CHEK®**

Live life. The way you want.

# ACCU-CHEK® Compact Plus

## Краткое руководство по использованию глюкометра Ассу-Чек Compact Plus

Измерение – рукой (продолжение)



#### 4. Щелчок

- Зафиксируйте устройство для прокалывания пальца, полностью вдавив кнопку управления вниз.
- Прижмите устройство для прокалывания пальца ближе к кончику пальца сбоку и еще раз нажмите кнопку управления. Сработает прокалыватель.
- Дополнительно Вы можете снять устройство для прокалывания пальца и, как обычно, использовать его отдельно.



#### 5. Измерение

- При помощи черной канавки на передней стороне тестовой ленты соберите капли крови.
- **Внимание:** Тестовая лента должна быть установлена вертикально вниз, поэтому держите прибор вертикально.
- Примерно через пять секунд на табло появится результат Вашего измерения.
- При повторном нажатии кнопки Test использованная тестовая лента удаляется.
- После использования 17 тестовых лент кассеты замените кассету, следуя инструкциям пункта „Установка ленточной кассеты“.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK COMPACT PLUS and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.

[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)  
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim



**ACCU-CHEK®**

Live life. The way you want.

# ACCU-CHEK® Compact Plus

## Краткое руководство по использованию глюкометра Accu-Chek Compact Plus

### Важнейшие символы и сообщения об ошибках



#### Прибор не включается; возможные причины:

- разряжены элементы питания.
- слишком низкая температура.
- прибор неисправен.



#### Диапазон измерения

- „HI“: Значение измерения превышает максимально допустимый диапазон измерения 600 mg/dL (33,3 mmol/L)
- „LO“: Значение измерения превышает минимально допустимый диапазон измерения 10 mg/dL (0,6 mmol/L)



#### Срок годности – 90 дней

Срок годности ленточной кассеты просрочен (90 дней). Непригодные тестовые ленты. Отсутствие символа с часиками указывает на то, что прибор не может рассчитать срок годности (90 дней).

Возможные причины:

- Использование поврежденной ленточной кассеты.
- Был открыт отсек кассеты.
- Для замены элементов питания Вам понадобилось более двух минут, при этом поврежденная кассета оставалась в приборе.



#### Элементы питания

Элементов питания хватает для проведения примерно 50-ти измерений (при использовании аккумуляторных батарей NiMH вместо предписанных Вы сможете провести однозначно менее 50 измерений). В случае, если символ исчезает через три секунды, питания больше не хватит даже на одно измерение.



#### Температура

- При появлении значения измерения и символа температуры: Во время проведения измерения температура была в пределах допуска. Значение измерения является ориентировочным. Для более точного результата измерение следует повторить при оптимальной температуре (от +10°C до +40°C).



#### Замена кассеты

- Установленная ленточная кассета пуста. Установите новую кассету.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK COMPACT PLUS and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.

[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)  
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim



# ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.

# ACCU-CHEK® Compact Plus


## Краткое руководство по использованию глюкометра Accu-Chek Compact Plus

Важнейшие символы и сообщения об ошибках (продолжение)



### Ленточная кассета отсутствует!

- Выключите прибор, нажав кнопку Test; установите кассету.

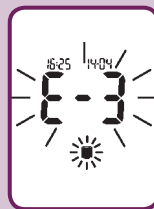


### Ленточная кассета не вращается.

- Выключите прибор и извлеките ленточную кассету. Снова установите кассету и закройте крышку отсека.



### Заедает тестовая лента или не вращается ленточная кассета.

- Выключите прибор и извлеките ленточную кассету. Снова установите кассету и закройте крышку отсека.

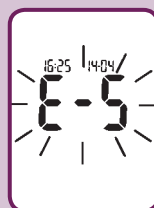

### Символ появляется в следующих случаях:

- загрязнено окно измерений/конденсат в приборе.
- Кровь нанесена слишком рано/нанесено мало крови (как альтернатива может появиться сообщение „E-2“). Наносите кровь только после появления символа тест-полоски.
- При проведении измерения тест-полоска была сильно согнута.
- Прибор был выключен и снова включен, а в приборе все еще установлена старая тест-полоска.
- Перед проведением измерения тест-полоска была вытянута из прибора.

### Мы всегда с Вами.

При возникновении вопросов просим Вас связаться с сотрудниками **сервисного центра Accu-Chek** по телефону. Сотрудники сервисного центра с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 по телефону **01 80-2 00 01 65** (6 центов за разговор).

Также вы можете посетить веб-страницу **www.accu-chek.de** и загрузить дополнительные материалы – это просто и удобно.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK COMPACT PLUS and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.

**www.accu-chek.com**  
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim



**ACCU-CHEK®**

Live life. The way you want.