

ACCU-CHEK® Compact Plus

Testa ditt blodsocker

Accu-Chek Compact Plus-mätaren levereras med batterierna redan isatta samt med datum och tid inställt.

Accu-Chek Compact Plus-mätaren kodas automatiskt när testremsetrumman sätts i.

Sätta i eller byta testremsetrumma



1 Öppna luckan till trumfacket.



2 Tryck på den röda knappen för att komma åt trumman.



3 Luta mätaren framåt. Testremsetrumman faller ut.



4 Sätt i en ny testremsetrumma.


Test av blodsocker



1 Skjut ned testknappen i mitten för att mata fram en testremsa.



2 Håll mätaren så att testremsan pekar nedåt. Sätt testremsans framkant mot bloddroppen vid den svarta skåran. Testremsan suger då upp blodet.

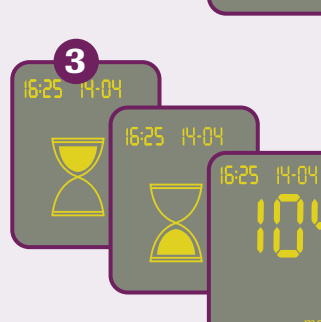

3 Se mätarens avläsning i teckenfönstret.



4 Skjut ned testknappen i mitten för att mata ut den använda testremsan.

ACCU-CHEK® *Softclix Plus*

Accu-Chek Softclix Plus-blodprovstagaren kan tas loss från Accu-Chek Compact Plus-mätaren med hjälp av skjutknappen på mätarens baksida eller användas medan den fortfarande sitter kvar.



1 Ta bort kåpan från blodprovstagaren.



2 Tryck ned kolven i blodprovstagarens ände för att mata ut den använda lansetten.



3 Sätt i en ny lansett i blodprovstagaren och tryck tills det klickar.



4 Ta bort skyddskåpan från lansetten med en vridrörelse.



5 Tryck tillbaka kåpan på blodprovstagaren. Kåpan snäpper på plats med ett klick.



6 Vrid kåpan till önskad djupinställning (totalt 11 olika inställningar).



7 Tryck in kolven helt. Kolven går tillbaka med ungefär en tredjedel. Blodprovstagaren är nu laddad.



8 Placera blodprovstagaren mot vald testplats, tryck ned kolven i blodprovstagarens ände på nytt tills den klickar för att ta ett blodprov.

Accu-Chek Softclix Plus-blodprovstagaren är avsedd för självtester av en enda person. Den får inte användas för blodprovstagning av flera olika patienter, eftersom den inte har något skydd mot korsinfektion.

Denna bildguide ersätter inte den kompletta bruksanvisningen för Accu-Chek Compact Plus-blodsockermätaren. Läs noggrant alla säkerhetsmeddelanden i bruksanvisningen.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.