

## Delme Aparatı ve Test Çubuğu Entegreli Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

Tek el ile portatif ölçüm. Accu-Chek Compact Plus cihazı iki ölçüm işlemini tek bir işlemde birleştirmiştir. Otomatik test çubuğu hazırlaması ve otomatik kodlama kan şekeri değerinizin çok kolay şekilde ölçülmesini sağlar. Ayrıca cihaz çok fonksiyonlu donanımı ile ölçüm işleminin tek elle yapılmasını da mümkün kılar.

### İlk kullanımdan önce

#### 1 Test çubuğu haznesinin takılması

- Yeni test çubuğu haznesini takmak için önce ölçüm cihazının hazne yerleştirme kapağını açın.
- Kırmızı hazneye izin verme düğmesine basın.
- Boş test çubuğu haznesini çıkarın ve yeni hazneyi yerleştirin.
- **Kodlama** işlemi **otomatik** olarak gerçekleşir.
- Kullanılmış test çubuğu haznesini evsel atıkların atıldığı çöpe atabilirsiniz.



#### 2 Delme elemanının hazırlanması

- Delme elemanı kapağını çıkarın ve kesici eleman tutma aparatının içine yeni kesici elemanı yerleştirin. Kesici elemanın yerine geçtiği tık sesi ile duyulur.
- Kesici elemanın kapağını kapatın ve delme aparatının koruma kapağını takın.
- Son olarak kapağı döndürerek istenilen delme derinliğine ayarlayın.



### Tek el ile ölçüm!

#### 3 Ölçümü başlatma

- Ellerinizi yıkayın ve iyice kurutun.
- Ölçüm cihazını test butonuna basarak çalıştırın. Bunun üzerine test çubuğu haznesinden bir adet test çubuğu çıkar.



#### 5 Ölçüm

- Test çubuğunun ön tarafındaki siyah çentik ile kan damlasını alın
- **Önemli:** Test çubuğunun dikey olarak aşağıya doğru bakması için ölçüm cihazı dikey konumda tutulmalıdır.
- Yaklaşık beş saniye sonra kan şekeri değeriniz ekranda gösterilir.
- Test butonuna tekrar bastığınızda kullanılmış olan test çubuğu dışarı atılır.
- Bir hazne içindeki 17 adet test çubuğu tüketildiğinde test çubuğunu "test çubuğu haznesinin değiştirilmesi" bölümünde açıklandığı şekilde değiştirin.



#### 4 Delme işlemi

- Delme derinliğini ayarlayın.
- Düğmeyi dayanağa kadar basarak kesici elemanı gerin.
- Kesici elemanı parmak ucunuzun yan tarafına pozisyonlayın ve tekrar düğmeye basın. Kesici eleman devreye girer.
- Opsiyonel olarak delme aparatını cihazdan çıkarabilir ve klasik delme işleminde olduğu gibi ayrı olarak kullanabilirsiniz.



Diğer detaylı bilgiler Accu-Chek Compact Plus kan şekeri ölçüm cihazı kullanım kılavuzundan okunabilir

# ACCU-CHEK® Compact Plus

## Önemli ekran sembolleri ve hata mesajları bilgileri



### Cihaz aşağıdaki sebeplerden dolayı çalıştırılmıyor:

- Piller boşalmıştır
- Hava çok soğuktur
- Cihaz arızalıdır



### Ölçüm aralığı

- "HI" Ölçülen değer, 600 mg/dl (33.3 mmol/l) değerindeki ölçüm aralığının üzerindedir
- "LO" Ölçülen değer, 10 mg/dl (06 mmol/l) değerindeki ölçüm aralığının altındadır.



### 90 Gün kullanım süresi

Test çubuğu haznesinin 90 günlük kullanım süresi dolmuştur. Test çubukları kullanılamazdır. Saat sembolü gösterilmediğinde cihazın 90 günlük kullanım süresini hesaplamasının mümkün olmadığı gösterilir. Bu şu durumlarda meydana gelir:

- Cihaza önceden açılmış bir test çubuğu haznesi taktığınızda.
- Hazne bölmesini açtığınızda.
- Pil değiştirme işlemi için iki dakikadan fazla zaman harcadığınızda ve bu esnada yarım kalan hazne cihazın içinde kaldığında.



### Piller

Piller daha max. 50 ölçüm işlemi için yeterlidir (pillerin yerine NiMH pilleri kullanıldığında 50 ölçümden daha az ölçüm yapılabilir). Sembol üç saniye sonra yok olduğunda ölçüm için gerekli olan güç kaynağı yeterli değildir.



### Sıcaklık

- Ekranda bir ölçüm değeri ve sıcaklık sembolü gösterildiğinde: Ortam sıcaklığı ölçüm işlemi esnasında sınırdadır. Ölçüm değeri sadece oryantasyon değeri olarak görülecektir. Ölçümün güvenli şekilde yapılabilmesi için ölçüm, mükemmel sıcaklık aralığında (+10 ile +40 C derece arasında) tekrarlanacaktır.




### Test çubuğu haznesini değiştirme

- Takılmış olan test çubuğu haznesi boşalmıştır. Lütfen yeni hazne takın.




### Cihaz içinde test çubuğu haznesi yoktur

- Test butonuna basarak cihazı kapatın ve yeni hazne takın.

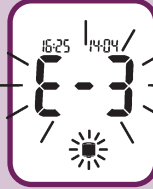

### Test çubuğu haznesi dönmüyor

- Cihazı kapatın ve test çubuğu haznesini çıkarın. Test çubuğu haznesini yeniden takın hazne bölümü kapağını kapatın.

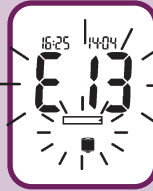

### Test çubuğu sıkışıyor veya test çubuğu haznesi dönmüyor

- Cihazı kapatın ve test çubuğu haznesini çıkarın. Test çubuğu haznesini yeniden takın hazne bölümü kapağını kapatın.



### Aşağıdaki durumlarda ekranda bu sembol gösterilir

- Ölçüm optik düzeni kirlendiğinde veya cihaz içinde yoğunlaşma suyu bulunduğunda.
- Kan damlası numunesini çok erken veya çok az miktarda sürdüğünüzde (alternatif olarak E 21 nolu mesaj da görüntülenir). Kan damlasını ancak test çubuğu sembolü gösterildiğinde sürün.
- Test çubuğunu ölçüm esnasında çok fazla büküğünüzde.
- Cihazı açıp kapattığınızda ve önceki test çubuğu halen cihaz içinde kaldığında.
- Ölçüm işlemi öncesinde test çubuğunu cihazdan çıkardığınızda.

### Kan şekeri Hastalığı Partneriniz

Accu-Chek kan şekeri hastaları için tek elden geniş çaplı çözümler ve kişisel danışma ve bilgilendirme hizmetleri sunar. Hastalık ile herhangi bir konuda sorularınız olduğunda Accu-Chek Müşteri Hizmetleri Merkezimizdeki personelimizden telefonla bilgi alabilirsiniz. Mesai saatlerimiz: Pazartesi-Cuma Saat 8:00 ile 18:00 arası telefon No: 0180 / 2 00 01 65 (görüşme başına 6 cent). Ayrıca birçok ücretsiz hizmet ve güncel bilgiler [www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de) internet adresimizde de mevcuttur. Accu-Chek Compact Plus kan şekeri ölçüm sistemleri ile ilgili diğer detay bilgileri Eylül 2005 tarihinden itibaren [www.accu-chek.de/compactplus](http://www.accu-chek.de/compactplus) internet adresimizde mevcut olacaktır.

ACCU-CHEK ve SOFTCLIX  
Markaları Roche firmasının markalarıdır.

[www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)  
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim



**ACCU-CHEK®**

Yaşamak istediğim hayat.