

# ACCU-CHEK® Compact Plus

## Kan şekerinizin ölçülmesi

Accu-Chek Compact Plus'un pilleri önceden takılı ve tarih ve zaman önceden ayarlı olarak gelir. Accu-Chek Compact Plus test sribi tamburu yerleştirildiğinde otomatik olarak kodu alır.

### Test sribi tamburunun yerleştirilmesi veya değiştirilmesi



1 Tambur bölmesi kapağını açın.



2 Kırmızı tambur serbest bırakma düğmesine basın.



3 Ölçüm cihazını öne doğru eğin. Test sribi tamburu dışarı düşer.



4 Yeni bir test sribi tamburu yerleştirin.


### Kan şekerinin ölçülmesi



1 Ortadaki test düğmesini bir test sribini serbest bırakmak için aşağıya çekin.



2 Ölçüm cihazını test sribi aşağıya bakacak şekilde tutun. Kan damlasını test sribinin ön kenarına siyah çentiğin bulunduğu yer dokundurun. Test sribi kanı içeri çeker.

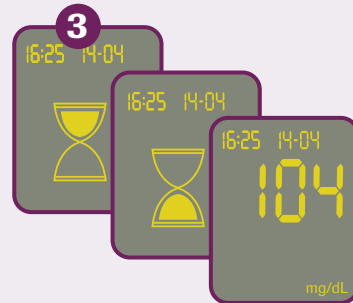

3 Ölçüm cihazının okuduğu değer için ekrana bakın.



4 Ortadaki test düğmesini test sribini dışarıya atılması için aşağıya çekin.

# ACCU-CHEK® Softclix Plus

Accu-Chek Softclix Plus lanset cihazı Accu-Chek Compact Plus ölçüm cihazının arkasındaki kayan düğmeyi kullanarak ayrılabilir veya halen bağlı olarak kullanılabilir.



1 Lanset cihazından uç kapağını çıkarın.



2 Kullanılmış lanseti dışarı atmak için lanset cihazının ucundaki pistonu basın.



3 Lanset tutucuya yeni bir lanseti kaydırarak takın ve yerine tıklayıp oturuncaya kadar içeriye itin.



4 Lansetten koruyucu kapağı çevirerek çıkartın.



5 Lanset cihazına uç kapağını tekrar bastırarak takın. Kapak yerine tıkklayarak oturur.



6 Uç kapağını çevirerek istediğiniz derinlik ayarına getirin (toplam 11 ayar).



7 Pistonu sonuna kadar aşağıya itin. Piston yolun yaklaşık üçte biri kadar bir kısmı geri döner. Lanset cihazı artık hazırdır.



8 Lanset cihazını seçilen test bölgesi üzerine yerleştirin ve bir örnek almak için lanset cihazının ucundaki pistonu tıkklayıncaya kadar tekrar bastırın.

Accu-Chek Softclix Plus lanset cihazı hastanın kendini izlemesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çok sayıda hastanın görüldüğü bir ortamda kan almak için kullanılmamalıdır çünkü çapraz enfeksiyona karşı koruyucu herhangi bir özelliği yoktur.

Bu Kullanım Şeması Accu-Chek Compact Plus kan şekeri sisteminin kapsamlı Referans El Kitabının yerini almaz. Lütfen Kullanıcı El Kitabındaki güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.  
© 2007 Roche Diagnostics

[www.accu-check.com](http://www.accu-check.com)  
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim



**ACCU-CHEK®**

Live life. The way you want.