

ACCU-CHEK® Compact Plus

Vércukorszint mérés

Az Accu-Chek Compact Plus behelyezett elemekkel kerül forgalomba, és a dátum és az idő előre be vannak állítva.

Az Accu-Chek Compact Plus automatikusan elvégzi a kódolást a tesztcsíktár behelyezésekor.

A tesztcsíktár behelyezése vagy cseréje



1 Nyissa fel a tárat tartalmazó rész fedelét.



2 Nyomja meg a tárat kioldó piros kioldógombot.



3 Döntse előre a mérőkészüléket, hogy kiessen belőle a tesztcsíktár.



4 Helyezze be az új tesztcsíktárat.


A vércukorszint mérése



1 A tesztcsík kioldásához nyomja meg a középső gombot.



2 Tartsa úgy a mérőkészüléket, hogy a tesztcsík lefelé mutasson. Érintse hozzá a vércseppet a tesztcsík elülső széléhez, ott, ahol a fekete jelölés látható. Ekkor a tesztcsík felszívja a vért.

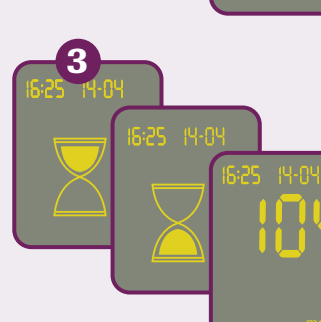

3 Olvassa le a készülék kijelzőjén található adatot.



4 A használt tesztcsík kidobásához nyomja meg a középső gombot.

ACCU-CHEK® *Softclix Plus*

Az Accu-Chek Softclix Plus szűrőeszközt le lehet választani az Accu-Chek Compact Plus mérőkészülékről az annak hátoldalán található tologomb segítségével, vagy a mérőkészülékre helyezve is alkalmazni lehet.



1 Távolítsa el a szűrőeszköz zárókupakját.



2 A használt lándzsa kidobásához nyomja meg a szűrőeszköz végén található forgófejet.



3 Csúsztasson egy új lándzsát a lándzsatartóba és nyomja be kattanásig a helyére.



4 Távolítsa el csavaró mozdulattal a lándzsa védőkupakját.



5 Nyomja vissza a szűrőeszközre a zárókupakot. A kupak kattanással kerül vissza a helyére.



6 Csavarja a zárókupakot a kívánt szűrőmélységre (11 mélység összesen).



7 A forgófejet tartsa végig lenyomva. A forgófej a megtett út harmadánál visszafelé fordul el. A szűrőeszköz ekkor felhúzott állapotba kerül.



8 Helyezze rá a szűrőeszközt a kiválasztott helyre, nyomja le újra a szűrőeszköz végén található forgófejet egészen addig, amíg be nem kattan.

Az Accu-Chek Softclix Plus szűrőeszköz egyetlen betegen, az általa végzett önellenőrzésre alkalmas. Nem szabad több betegnél történő vérvételre alkalmazni, mert nem tartalmaz semmit, ami védelmet nyújtana a keresztfertőzésekkel szemben.

Ez a leírás nem helyettesíti az Accu-Chek Compact Plus vércukormérő használati útmutatóját. Kérjük olvassa el a használati útmutató biztonsági előírásokról szóló részeit.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.