

Accu-Chek Connect – Kurzanleitung zur Erstellung eines Onlinekontos



1. Rufen Sie in Ihrem Browser **www.accu-chek-connect.de** auf.
(Mögliche Browser: Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome und Internet Explorer ab Version 9)
2. Klicken Sie auf **Beginnen Sie mit Ihrer Registrierung** unter **Privates Konto erstellen** und füllen Sie die Felder in der Maske **Privatkonto-Registrierung** aus.

Ihr Benutzername muss zwischen 5 und 30 Zeichen lang sein (Buchstaben/Ziffern) und darf keine Sonderzeichen enthalten (% , ! , # , etc.). Darüber hinaus sollte der Benutzername nicht bereits vorher verwendet worden sein. Ihr Passwort sollte mindestens 8 Zeichen lang sein und mindestens einen Buchstaben (Groß- und Kleinschreibung beachten!) sowie eine Ziffer, aber keine Sonderzeichen (% , ! , # etc.) enthalten. Es darf maximal 4 Zeichen Ihres Benutzernamens und dasselbe Zeichen höchstens viermal direkt nacheinander enthalten (z. B. 99999).
3. Akzeptieren Sie die Nutzungs- und Lizenzvereinbarungen. Falls Sie auf Ihrem Computer bereits früher mit der Accu-Chek 360° Diabetes Management Software gearbeitet haben, klicken Sie bitte auf **Ja*** und folgen den Bildschirmanweisungen. Falls nicht, klicken Sie bitte auf **Nein, ohne Datenimport fortfahren**.

* (Detaillierte Hinweise zum Export von Dateien aus dem Accu-Chek 360° Diabetes Management Software finden Sie im Hilfe-Menü dieses Systems.)
4. Falls Sie das Konto für eine Angehörige oder einen Angehörigen mit Diabetes anlegen, deaktivieren Sie bitte das Kästchen **Ich nutze dieses Konto für mich selbst**.
5. Tragen Sie fehlende Angaben ein (Pflichtfelder sind durch ein * gekennzeichnet) und klicken Sie anschließend auf **Änderungen speichern**.
6. Sie können die Daten jedes Accu-Chek Blutzuckermessgeräts und jeder Accu-Chek Insulinpumpe schnell und einfach in nur zwei Schritten in das Webportal hochladen. Klicken Sie dazu auf der Startseite auf **Beginnen Sie mit der Datenübertragung** und folgen Sie den Installationsanweisungen für die Accu-Chek Connect Geräteschnittstelle. Verbinden Sie nun Ihr Gerät mit Ihrem Computer (über Accu-Chek Smart Pix, über ein Mikro-USB-Standardkabel oder über ein Accu-Chek Realtyme-Kabel).
7. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um mit Ihrem Diabetesteam Ihre Diabetesdaten über www.accu-chek-connect.de zu teilen und diese für zukünftige Besprechungen zu nutzen.

(Dieser Schritt ist keine Voraussetzung, um Accu-Chek Connect nutzen zu können. Ihr Praxisteam erhält dadurch jedoch Informationen, mit denen bessere Therapieentscheidungen getroffen werden können.)

Name des Onlinekontos Ihres Praxisteam: _____