

Schnellanleitung  
VERBINDUNG HERSTELLEN

Bessere Vernetzung,  
bessere Entscheidungen.



Herunterladen der App

AUF IHREM MOBILEN GERÄT

Sie können die kostenlose Accu-Chek Connect Diabetes Management App\* hier herunterladen:



\*Verfügbar für ausgewählte mobile Geräte

- 1 Öffnen Sie den App Store.
- 2 Suchen Sie nach der ACCU-CHEK Connect Diabetes Management App.
- 3 Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

**! WARNUNG**  
Verwenden Sie die App niemals gemeinsam mit einer anderen Person.

Einrichten eines Webkontos

AUF IHREM MOBILEN GERÄT

Die folgende Anleitung bezieht sich auf das Einrichten eines Webkontos über die App; Sie können den Vorgang jedoch unter [www.accu-chekconnect.com](http://www.accu-chekconnect.com) auch über den Browser Ihres PCs durchführen.

- 1 Wählen Sie in der App **Einstellungen > Webkonto**.
- 2 Wählen Sie die Option **Klicken Sie HIER, um ein Webkonto zu erstellen**.
- 3 Geben Sie alle für das Konto relevanten Informationen ein.  
-Der Benutzername muss aus 5–30 Zeichen (nur Buchstaben oder Ziffern) bestehen.  
-Das Kennwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen und sowohl Buchstaben als auch Ziffern enthalten.
- 4 Wählen Sie **Nein**, um vorhandene Daten zu übertragen, es sei denn, Sie sind an einem PC und nutzen bereits die Diabetes Management Software.
- 5 Vervollständigen Sie Ihre Diabetesdaten.

- 6 Schließen Sie den Browser, indem Sie auf die **Home**-Taste Ihres mobilen Geräts drücken.
- 7 Öffnen Sie die App erneut.
- 8 Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Kennwort** ein, die Sie gerade für Ihr **Webkonto** erstellt haben und wählen Sie **Anmelden**.  
Sie werden die Bestätigung erhalten, dass sich Ihre App bei Ihrem Webkonto zur Datenübertragung angemeldet hat.
- 9 Wählen Sie **Zurück** (←), um zu den **Einstellungen** zurückzukehren.


Herstellen einer Verbindung zwischen Blutzuckermessgerät und mobilem Gerät

AUF IHREM MOBILEN GERÄT

- 1 Wählen Sie in der App **Einstellungen > Messgerät verbinden**.
- 2 Falls Sie dazu aufgefordert werden, stellen Sie sicher, dass die drahtlose **Bluetooth**-Technologie aktiviert ist.
- 3 Wählen Sie **Weiter**.

AUF IHREM MESSGERÄT

- 4 Schalten Sie das Messgerät ein und verwenden Sie **↔** oder **↵** zur Navigation und die **OK**-Taste zum Auswählen der gewünschten Option.
- 5 Wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos > Ja**.

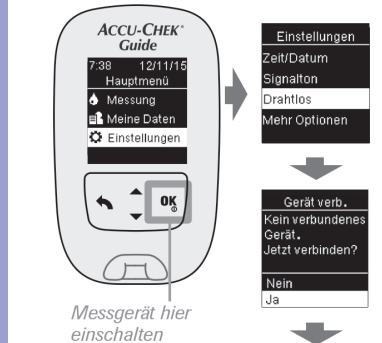

**HINWEIS:** Der angezeigte Code ist 90 Sekunden lang gültig.

AUF IHREM MOBILEN GERÄT

- 6 Wenn der Code auf dem Display des Messgeräts angezeigt wird, wählen Sie in der App **Weiter**.
- 7 Wählen Sie **Messgerät + xxxxxxxx**. (Warten Sie, bis sich ein Pop-up-Menü öffnet.)
- 8 Geben Sie den Code, der auf dem Display des Messgeräts angezeigt wird, in die App ein.
- 9 Schließen Sie die Tastatur und wählen Sie **OK**, um den Code zu bestätigen.
- 10 Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde.
- 11 Wählen Sie **Schließen** oder **Messgerät registrieren**, nachdem **Verbindung erfolgreich** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 12 Wählen Sie **Zurück**, um zur Startseite zurückzukehren.

Senden eines Blutzuckermesswerts an Ihr mobiles Gerät

AUF IHREM MESSGERÄT

Schalten Sie nach dem Herstellen einer Verbindung Ihr Messgerät zunächst aus, bevor Sie eine Blutzuckermessung durchführen. Nachdem Sie eine Blutzuckermessung erfolgreich durchgeführt haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um den Blutzuckermesswert an Ihr mobiles Gerät zu senden.



- 1 Drücken Sie auf die **OK**-Taste, um den Messwert zu markieren.



- 2 Drücken Sie **↵** um die gewünschte Markierung auszuwählen. Drücken Sie auf die **OK**-Taste, um die Auswahl der Markierung zu bestätigen. Drücken Sie auf die **OK**-Taste, um den Messwert zu senden.

**HINWEIS:** Auto-Senden muss im Messgerät **aktiviert** sein, damit Blutzuckermesswerte automatisch zum verbundenen Gerät gesendet werden können. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, um weitere Informationen zu erhalten.

AUF IHREM MOBILEN GERÄT

- 3 Ihr Blutzuckermesswert erscheint auf der Startseite Ihrer App.

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 2015-09

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)

ACCUCHEK, ACCUCHEK CONNECT und ACCUCHEK GUIDE sind Marken von Roche.

Die Wortmarke **Bluetooth**® und die dazugehörigen Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden durch Roche unter Lizenz verwendet.

APPLE, das APPLE Logo und APP STORE sind Marken der Apple Inc.  
GOOGLE PLAY ist eine Marke von Google Inc.

© 2015 Roche Diabetes Care  
07545827001-1215  
07545827001(01)-1215

