

## Accu-Chek® Mobile –


قم بقياس سكر الدم لديك في أي وقت وأي مكان.

قم بالقياس في 4 خطوات سهلة



خذ عينة الدم

أضغط على وحدة الوخز بقوة على جانب أكمة الأصبع. أضغط الآن على زر الإطلاق إلى أسفل تماماً: نقرة 1 فقط للشد والإطلاق.

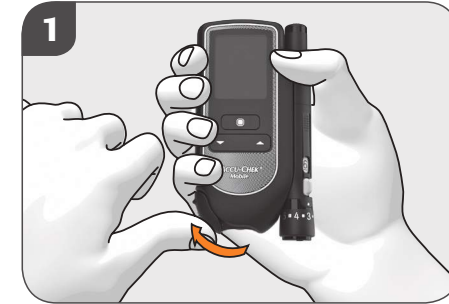


الفتح

قم بفتح واقي القمية. جهاز القياس سوف يبدأ في العمل.



الغلق

بعد 5 ثواني تقريباً يمكنك قراءة النتيجة. إذا أغلقت واقي القمية. فسوف يتوقف الجهاز تلقائياً عن العمل.

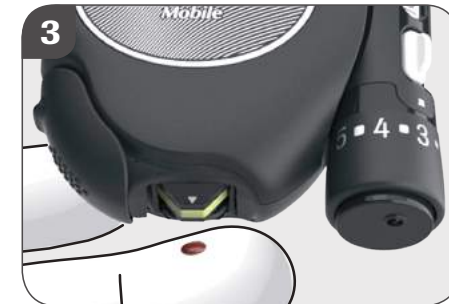

القياس

ضع قطرة الدم في منتصف منطقة الاختبار. قم بلامسة منطقة الاختبار برفقة.



خراطوشة اختبارات بها 50 اختبار

أسطوانة أدوات وخز  
بها 6 أدوات وخز معقمات

استبدال خرطوشة أدوات الوخز



أزغ الغطاء من وحدة مساعدة الوخز



أزغ أسطوانة أدوات الوخز

التشغيل / استبدال خرطوشة الاختبار (1-3)



أفتح واقى القمة تماماً وحتى النهاية. بهذا فقط تستطيع فتح مقر الخرطوشة ووضع خرطوشة الاختبار.



ادفع زر الفتح الخاص بغطاء مقر الخرطوشة إلى أعلى.



ضع خرطوشة اختبار جديدة في جهاز القياس. اغلق غطاء مقر الخرطوشة وواقى القمة.



اسحب إلى الخلف رقاقة الحماية الخاصة بالبطاريات من جهاز القياس. أزغ رقاقة الحماية من شاشة العرض.

تحضير أداة وخز



1 خرطوشة أدوات الوخز  
6 أدوات وخز

ضع خرطوشة أدوات وخز جديدة (الطرف الأبيض أولاً). الآن يتوافر لديك للاستعمال 6 أدوات وخز معقمت.



ضع الغطاء مرة أخرى.



جهز وحدة مساعدة الوخز لأخذ عينة الدم في المرة القادمة: حرك الزر في اتجاه 1 ثم حركه مرة أخرى في اتجاه 2.



قم بتدوير الغطاء حتى يتواجد عمق الوخز المرغوب فيه على العلامة. إبدأ بعمق وخز متوسط. على سبيل المثال 3.



أزغ خرطوشة أدوات الوخز فقط بعد استهلاك جميع الأدوات الـ 6.



خرطوشة أدوات الوخز التي تم نزعها لا يمكن وضعها في الجهاز مرة أخرى. يمكن التعرف عليها من الشريط الأحمر.

www.accu-check.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim



إن ACCU-CHEK MOBILE و ACCU-CHEK و FASTCLIX علامات تجارية مملوكة لشركة Roche. حقوق الطبع محفوظة لـ Roche Diabetes Care 2016 جميع الحقوق محفوظة.

ACCU-CHEK®