

Accu-Chek® Mobile – Mesurez votre glycémie quand et où vous le voulez.



Mesure en 4 étapes simples




1

Ouvrir
Ouvrez la protection de l'aiguille.
Le lecteur s'allume.



2

Prélever le sang
Appuyez l'autopiqueur contre le bout du doigt.
Enfoncez ensuite le bouton de déclenchement :
1 seul clic pour armer l'autopiqueur et déclencher
la lancette.

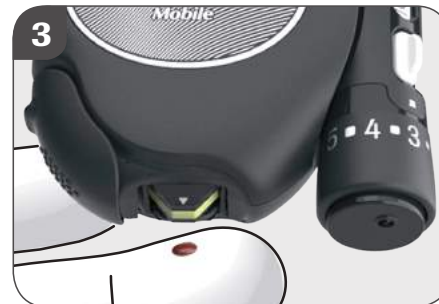

3

Mesurer
Appliquez la goutte de sang au milieu de la
zone réactive. Pour ce faire, effleurez simple-
ment la zone réactive.



4

Fermer
Le résultat apparaît après environ 5 s. Le lecteur
s'éteint quand vous refermez la protection de
l'aiguille.

Mise en marche/changement de la cassette de tests (1-3)



1 Ouvrez complètement la protection de l'aiguille jusqu'à la butée. C'est seulement à ce moment que vous pouvez ouvrir le compartiment de la cassette et y insérer la cassette de tests.



2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle du compartiment de la cassette.



3 Insérez une nouvelle cassette de tests dans le lecteur. Refermez le couvercle du compartiment de la cassette et la protection de l'aiguille.



4 Retirez la pellicule de protection des piles du lecteur. Retirez la pellicule de protection de l'écran.

Préparation d'une lancette



1 Préparez l'autopiqueur pour le prélèvement sanguin suivant : faites glisser le bouton-poussoir en direction ① puis replacez-le en direction ②.



2 Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque. Commencez par une profondeur de piqûre moyenne, p. ex. 3.



3 Ne retirez la cartouche de lancettes qu'après avoir utilisé les 6 lancettes.



Une cartouche de lancettes retirée n'est plus utilisable. Elle est reconnaissable à la bande rouge.

Changement de la cartouche de lancettes



1 Retirez l'embout de l'autopiqueur.



2 Retirez la cartouche de lancettes.



3 Insérez une nouvelle cartouche de lancettes (extrémité blanche d'abord). Vous disposez désormais de 6 lancettes stériles.



4 Remettez l'embout.



www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE et FASTCLIX sont des marques de Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Tous droits réservés.

ACCU-CHEK®