

Accu-Chek® Mobile – Pomiar glikemii w każdym miejscu i o każdej porze.

Pomiar w 4 prostych krokach



Otwarcie

Otworzyć osłonę końcówki.
Glukometr włącza się.



Pobranie krwi

Mocno docisnąć nakłuwacz z boku opuszki palca.
Przycisk spustowy nacisnąć teraz całkowicie do dołu: tylko 1 kliknięcie do naciągnięcia i wyzwolenia spustu.



Pomiar

Kroplę krwi nanieść na środek pola testowego.
Bardzo delikatnie dotknąć przy tym pola testowego.



Zamknięcie

Po ok. 5 sekundach można odczytać wynik.
Po zamknięciu osłony końcówki glukometr wyłącza się.



Kaseta testowa z
50 testami

Bębenek z
6 sterylnymi lancetami

Uruchomienie / wymiana kasety testowej (1-3)



1
Otworzyć osłonę końcówki całkowicie, aż do oporu. Tylko wtedy możliwe jest otwarcie komory kasety i włożenie kasety testowej.



2
Przesunąć przycisk odblokowujący pokrywę komory kasety do góry.



3
Włożyć nową kasetę testową do glukometru. Zamknąć pokrywę komory kasety i osłonę końcówki.



4
Ściągnąć folię ochronną baterii do tyłu z glukometru. Ściągnąć folię ochronną z wyświetlacza.

Przygotowanie lancetu



1
Przygotowanie nakłuwacza do następnego pobrania krwi: poruszyć dźwignię w kierunku ① i z powrotem w kierunku ②.



2
Obracać nasadkę, aż na oznaczeniu będzie widoczna żądana głębokość nakłucia. Zaczynać od średniego nakłuwacza, np. 3.



3
Bębnek usunąć dopiero po zużyciu wszystkich 6 lancetów.



Nowy bębnek z lancetami / Włożony, zużyty bębnek z lancetami / Czerwony pasek
Po wyjęciu bębnea z lancetami nie można go włożyć z powrotem. Można go poznać po czerwonym pasku.

Wymiana bębnea z lancetami



1
Zdjąć nasadkę z nakłuwacza.



2
Wyjąć bębnek z lancetami.



3
1 bębnek z lancetami = 6 lancetów
Włożyć nowy bębnek z lancetami (białym końcem do przodu). Dostępnych jest teraz 6 sterylnych lancetów.



4
Ponownie nałożyć nasadkę.



www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE i FASTCLIX są znakami towarowymi firmy Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ACCU-CHEK®