

# ACCU-CHEK<sup>®</sup> Mobile

SYSTEM ZUR BLUTZUCKERMESSUNG



## Kurzanleitung



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE und FASTCLIX sind Marken von Roche.


Roche Diagnostics GmbH  
68298 Mannheim, Germany  
www.accu-chek.com

0 536953001(01) 2008-11

Roche

### 1. Neues Messgerät vorbereiten



#### 1 Testkassette einsetzen

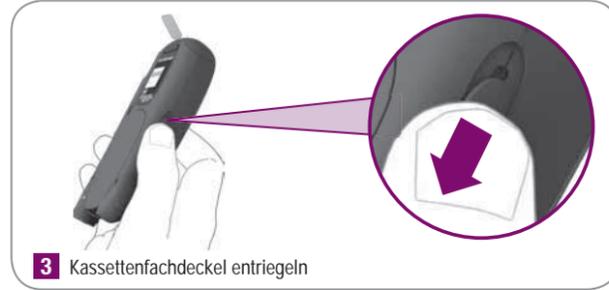

#### 2 Schutzfolie von der Anzeige abziehen und Schutzfolie der Batterien entfernen



#### 3 Sprache einstellen

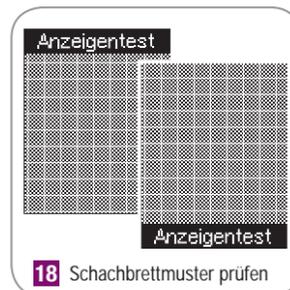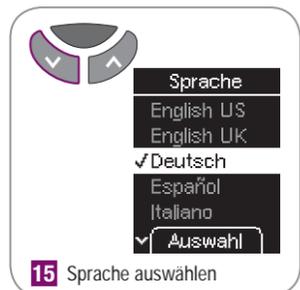

### 2. Neue Stechhilfe vorbereiten

#### Lanzettentrommel einsetzen und Stechtiefe einstellen




### 3. Blutzucker messen



## Stechhilfe für neue Blutgewinnung vorbereiten:


neue Lanzette bereitstellen

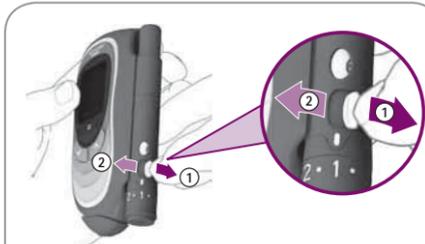

Hebel nach rechts und wieder zurück bewegen

## Wenn alle 6 Lanzetten benutzt sind:


Lanzettentrommel herausnehmen

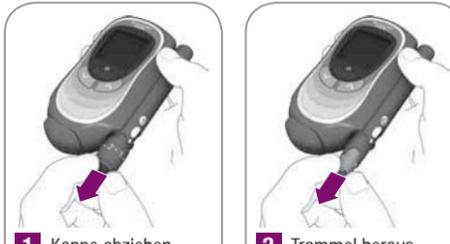

1 Kappe abziehen

2 Trommel herausziehen

## Leere Kassette wechseln

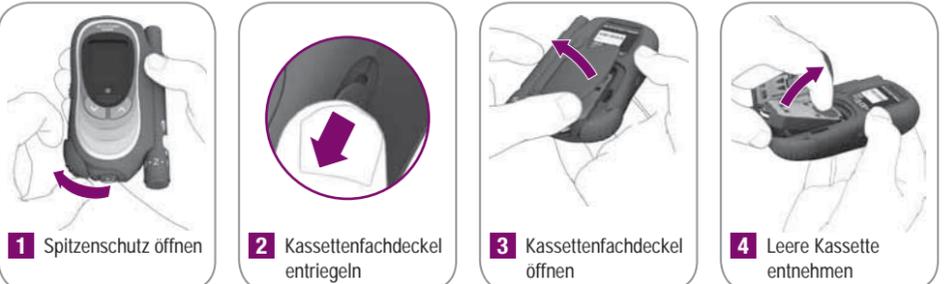


1 Spitzenschutz öffnen

2 Kassettenfachdeckel entriegeln

3 Kassettenfachdeckel öffnen

4 Leere Kassette entnehmen

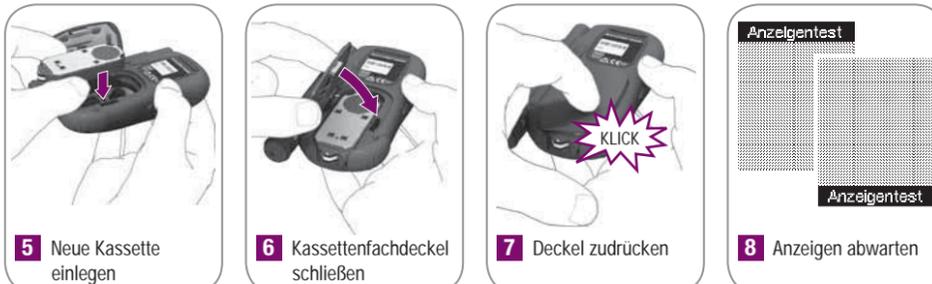

5 Neue Kassette einlegen

6 Kassettenfachdeckel schließen

7 Deckel zudrücken

8 Anzeigen abwarten



9 Taste drücken

10 Taste drücken


11 Nachfolgende Anzeigen

12 Spitzenschutz schließen


## Tastenfunktionen



## Einstellungen vornehmen

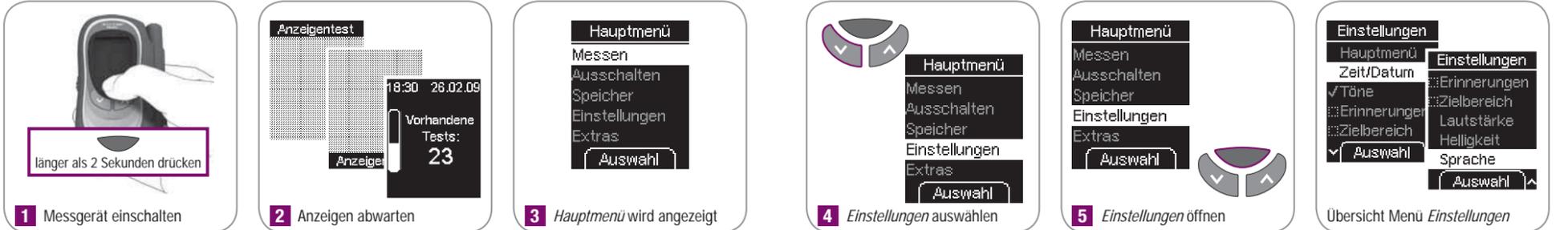


## Übersicht Messgerät

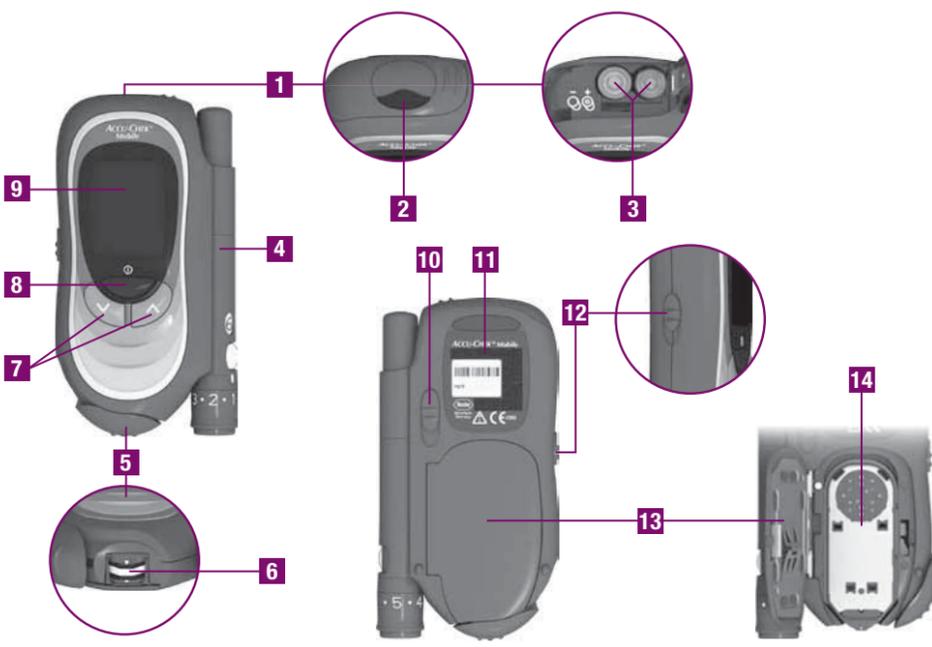

- Batteriefachdeckel (rechts: von oben; rechts außen: geöffnet)
- Infrarot-Schnittstelle
- Batterien [1,5 V, Typ AAA, Alkali-Mangan- bzw. Hochenergie-Batterien (2 Stück)]
- Stechhilfe (angedockt)
- Spitzenschutz (unten: geöffnet)
- Testfeld (auf der Kassettenspitze bereitgestellt für die Messung – hier tragen Sie das Blut auf)
- Tasten Ab/Auf
- Ein/Aus- und Eingabe-Taste
- Anzeige
- Entriegelungsknopf zum Abnehmen der Stechhilfe
- Typenschild
- Entriegelungsknopf zum Öffnen des Kassettenfachdeckels
- Kassettenfachdeckel (rechts: geöffnet)
- Testkassette (einglegt)

## Übersicht Stechhilfe

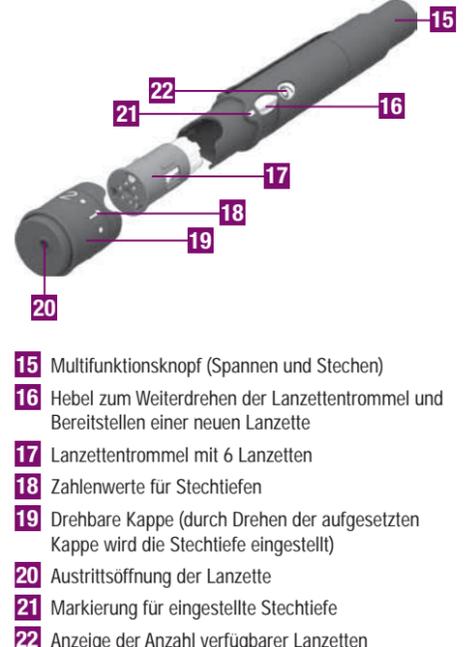

- Multifunktionsknopf (Spannen und Stechen)
- Hebel zum Weiterdrehen der Lanzettentrommel und Bereitstellen einer neuen Lanzette
- Lanzettentrommel mit 6 Lanzetten
- Zahlenwerte für Stechtiefen
- Drehbare Kappe (durch Drehen der aufgesetzten Kappe wird die Stechtiefe eingestellt)
- Austrittsöffnung der Lanzette
- Markierung für eingestellte Stechtiefe
- Anzeige der Anzahl verfügbarer Lanzetten

## Menü-Übersicht

