

Sie haben Interesse an Accu-Chek® Mobile?

Bestellen Sie sich jetzt unentgeltlich Ihr
Blutzuckermessgerät zum Testen:



www.accu-chek.de/testen



Kostenfreie Telefonnummer:
0800 4466800
(Mo.-Fr., 08:00-18:00 Uhr)



QR-Code scannen

Sie wollen mehr erfahren?

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800 (Mo-Fr, 08:00-18:00 Uhr).
Oder besuchen Sie unser Onlineportal www.accu-chek.de/mobile
bzw. unsere Facebook-Seite www.facebook.com/accucheckde

ACCUCHEK, ACCUCHEK MOBILE und FASTCLIX sind Marken von Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten.

www.accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim



ACCUCHEK®



Accu-Chek® Mobile

**Blutzuckermessgerät, Stechhilfe
und 50 Tests in einem.**

Diskretes Messen

Keine Einzelstreifen

Immer und überall

26 Sprachen **Alles in einem**

Nachgewiesene HbA1c-Senkung

**Testkassette
mit 50 Tests**

Kein Müll



Mehr Farbe, mehr Vielfalt?
www.accu-chek.de/mydesign



ACCUCHEK®

Accu-Chek® Mobile.

**Blutzuckermessgerät, Stechhilfe
und 50 Tests in einem – immer und überall.**

- Testkassette mit 50 Tests – keine einzelnen Teststreifen
- Integrierte 1-Klick-Stechhilfe mit Sechs-Lanzetten-Trommel für eine einfache Blutgewinnung
- Kein Entsorgen einzelner Teststreifen oder Lanzetten
- Speicher für 2.000 Messwerte
- Bequemes Auslesen der Daten per USB



Messen in vier einfachen Schritten.



1 Öffnen
Öffnen Sie den Spitzenschutz.
Das Messgerät schaltet sich ein.



2 Blut entnehmen
Drücken Sie die Stechhilfe
fest auf die Seite Ihrer Finger-
kuppe. Drücken Sie jetzt den
Auslöseknopf ganz nach
unten: Nur 1 Klick zum Span-
nen und Auslösen.



3 Messen
Tragen Sie den Blutstropfen
in der Mitte des Testfeldes
auf. Berühren Sie dabei das
Testfeld nur sanft.



4 Schließen
Nach etwa 5 Sek. können Sie
das Ergebnis ablesen. Wenn
Sie den Spitzenschutz
schließen, schaltet sich das
Messgerät aus.