


ACCU-CHEK® Multiclix

STECCHILFE

Kurzanleitung


Wichtig: Bitte ausführliche Gebrauchsanweisung der Accu-Chek Multiclix Stechhilfe unbedingt lesen. Sie enthält wichtige Hinweise zur Handhabung und zusätzliche Informationen.

Die Stechhilfe ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

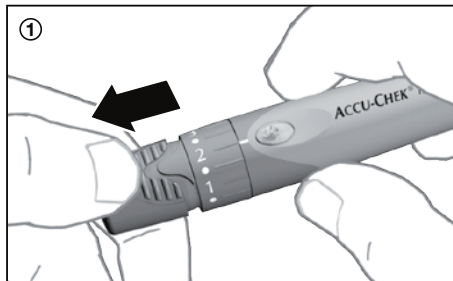


1. Ziehen Sie die Kappe der Accu-Chek Multiclix Stechhilfe ab.

Fassen Sie dabei die Kappe so an der Riffelung an wie in der Abbildung gezeigt. Dann lässt sie sich leicht abziehen.

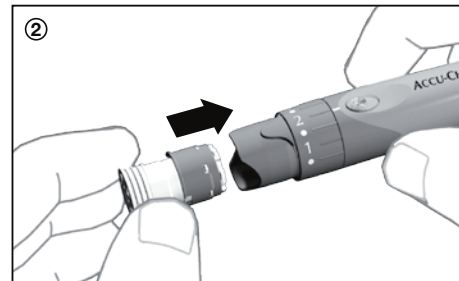

2. Drücken Sie eine neue Lanzetten-Trommel – mit dem blauen Ring voran – in die Accu-Chek Multiclix Stechhilfe.

Die Lanzetten-Trommel ist richtig eingesetzt, wenn sie mit einem hörbaren KLICK eingerastet ist.

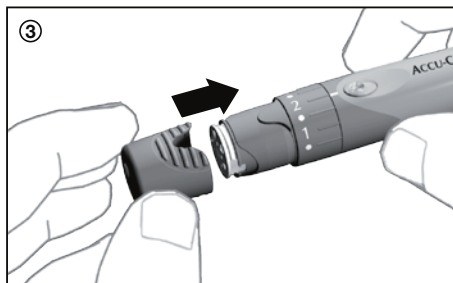


3. Setzen Sie die Kappe wieder auf.


Dabei müssen die Aussparung in der Kappe und der Bogen auf dem vorderen Teil von der Accu-Chek Multiclix Stechhilfe ineinander greifen.




Die Anzeige der verfügbaren Lanzetten zeigt 6 an, d.h. es stehen jetzt 6 Lanzetten zur Verfügung.

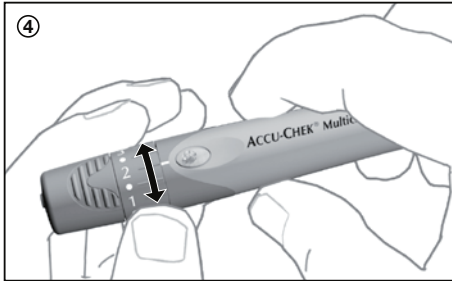


- 4. Drehen Sie den Einstellring auf Ihre gewünschte Stechtiefe, z. B. Stufe 1 oder 2 (0,5 = niedrigste; 5,5 = höchste Stechtiefe).**
Der weiße Strich vor dem Auslöseknopf zeigt auf die eingestellte Stechtiefe.

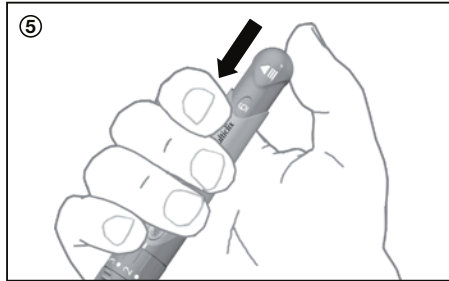


- 5. Drücken Sie bitte den Spannkopf am oberen Ende der Accu-Chek Multiclix Stechhilfe bis zum Anschlag („Kugelschreiberprinzip“).**
Die Accu-Chek Multiclix Stechhilfe ist gespannt, wenn die Mitte des Auslöseknopfes gelb ist.

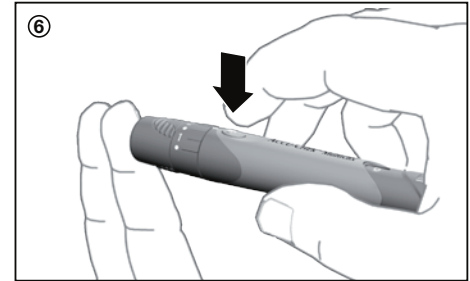

- 6. Drücken Sie die Accu-Chek Multiclix Stechhilfe auf die gewünschte Einstichstelle. Drücken Sie nun den Auslöseknopf, um Blut zu gewinnen.**
Führen Sie die Blutzuckermessung entsprechend der Gebrauchsanweisung Ihres Blutzuckermessgerätes durch.

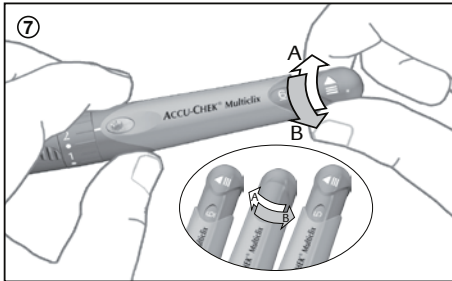

- 7. Neue Lanzette einsatzbereit machen:**
Drehen Sie den Spannkopf bitte eine Viertelumdrehung bis zum Anschlag (A) und wieder zurück (B). Die nächste Lanzette ist nun für Sie einsatzbereit. Gehen Sie wie hier beschrieben für jeden weiteren Lanzettenwechsel vor. Nach jedem Lanzettenwechsel zeigt die Anzeige der verfügbaren Lanzetten eine Lanzette weniger an, z.B. 3 statt vorher 4.

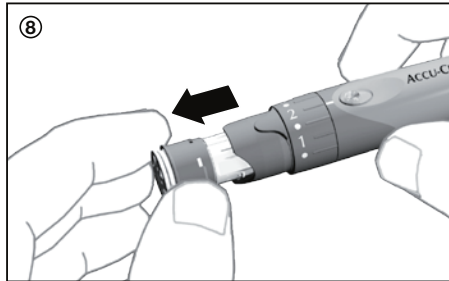

- 8. Lanzetten-Trommel auswechseln:**
Ziehen Sie bitte die Kappe der Accu-Chek Multiclix Stechhilfe ab (Bild 1). Ziehen Sie die Lanzetten-Trommel aus der Stechhilfe. Setzen Sie nun eine neue Lanzetten-Trommel ein (Bild 2). Setzen Sie bitte die Kappe wieder auf (Bild 3).


Kontakt:

Roche Diagnostics GmbH
68298 Mannheim, **Deutschland**
Accu-Chek Kunden Service Center
Tel: 0180/2000165
Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00
(6 ct/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz)



© Roche Diagnostics 2009

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK MULTICLIX sind Marken von Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
68298 Mannheim, Germany
www.accu-check.com

