

## Nutzen Sie die einfache und sichere Handhabung.

Das Accu-Chek Spirit 3,15 ml Ampullensystem ermöglicht es Ihnen, das Insulin Ihrer Wahl einfach, schnell und sicher umzufüllen:

### Komfortabel

- Einfache und intuitive Handhabung
- Alles komplett: Ampulle mit integrierter Umfüllhilfe
- System erleichtert ein blasenfreies, schnelles Auffüllen der Ampulle



### Sicher

- Gut geschützte Nadel hilft, Verletzungen zu verhindern
- Sicheres und stabiles Verbinden mit allen 10 ml-Standard-Insulinfläschchen (hörbares Klicken)
- Komponenten farblich unterschieden



### Praktisch

- Kompatibel mit den Insulinpumpen Accu-Chek Spirit, Accu-Chek Spirit Combo und H-TRONplus
- Nach Gebrauch problemlos im Hausmüll zu entsorgen
- Erhältlich in praktischen 5-Stück- und 25-Stück-Packungen



## Profitieren Sie von mehr Komfort und Flexibilität.

Das neue Accu-Chek Spirit 3,15 ml Ampullensystem mit integrierter Umfüllhilfe vereinfacht das Vorbereiten der Ampulle und macht Ihnen das Leben ein bisschen leichter. Ideale Partner dafür sind die Insulinpumpen Accu-Chek Spirit und Accu-Chek Spirit Combo – sie sind für Einsteiger und erfahrene Insulinpumpenträger leicht zu bedienen und können sich Ihren Erfahrungen individuell anpassen. Die Kombination aus Insulinpumpe und Umfüllhilfe bietet Ihnen schließlich den Komfort und die Flexibilität, die Sie im Alltag benötigen.



## Sie wollen mehr erfahren?

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da! **Tel.: 0180/200 04 12** (Mo – Fr, 8.00 – 18.00 Uhr, 6 ct/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). Oder besuchen Sie unser Online-Portal unter **www.accu-chek.de**

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO und H-TRONPLUS sind Marken von Roche.

[www.accu-chek.de](http://www.accu-chek.de)

Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim



# Insulin-Ampullen schnell und einfach befüllen.

Accu-Chek Spirit 3,15 ml Ampullensystem – mit integrierter Umfüllhilfe




05137616990 © – 0209 – 20. WWW



**ACCU-CHEK®**  
Leben. So wie ich es will.

## Bleiben Sie unabhängig bei der Wahl Ihres Insulins.

Wenn Sie keine vorgefertigten Ampullen mit Normalinsulin verwenden möchten, steht Ihnen mit dem Ampullensystem eine neue Technologie zur Verfügung. Sie erleichtert das schnelle und blasenfreie Befüllen der Leerampulle mit dem Insulin Ihrer Wahl.

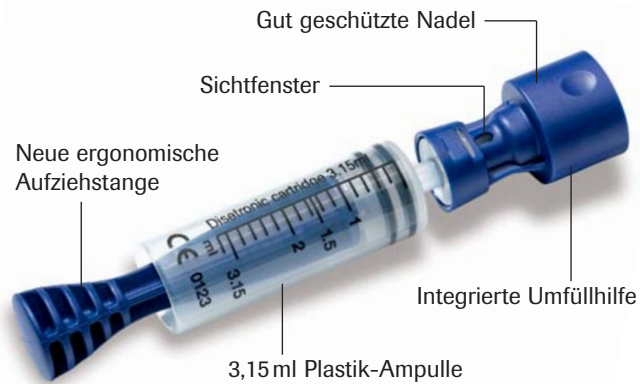

Das Ampullensystem besitzt eine integrierte Umfüllhilfe und wird einfach auf ein 10 ml-Standard-Insulinfläschchen aufgesetzt. Neben dem hohen Bedienkomfort kommt auch die Sicherheit nicht zu kurz: Die Nadel ist im Inneren der Umfüllhilfe und somit gut geschützt. Alle Komponenten sind farbig gekennzeichnet und leicht unterscheidbar – was blau ist, wird nach dem Umfüllvorgang entsorgt.

## Probieren Sie's aus: einfach wie noch nie.

Mit der integrierten Umfüllhilfe wird Ihnen das Auffüllen von Ampullen besonders leicht von der Hand gehen. Wir zeigen Ihnen die einzelnen Schritte im Detail:



### Schritt 1

Materialien vorbereiten und Hände waschen. Um die Ampulle zu füllen, ziehen Sie die Aufziehstange des Systems zurück, bis Sie einen Widerstand spüren (ca. 3,15 ml).



### Schritt 2

Stellen Sie das Insulinfläschchen auf eine feste, ebene Unterlage. Ampullensystem mit der Umfüllhilfe nach unten auf das Fläschchen aufsetzen, bis ein Klicken zu hören ist.



### Schritt 3

Die Aufziehstange ganz nach unten drücken und in dieser Position halten, um einen Druck im Fläschchen aufzubauen.



### Schritt 4

Das Fläschchen mit dem Ampullensystem auf den Kopf drehen, ohne die Aufziehstange loszulassen. Jetzt langsam und kontrolliert die Aufziehstange nach unten ziehen – das Insulin wird aus dem Fläschchen aufgezogen.



### Schritt 5

Eventuell auftretende Luftbläschen durch Klopfen mit dem Finger und mit Hilfe der Aufziehstange ins Insulinfläschchen zurückdrücken.



### Schritt 6

Das Fläschchen vom Ampullensystem abziehen. Die Aufziehstange jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, vom Stopfen lösen und abnehmen.



### Schritt 7

Die blaue Umfüllhilfe gegen den Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig von der Ampulle abziehen.



### Schritt 8

Schutzkappe auf die Ampullenspitze setzen, bis sie einrastet. Aufziehstange und Umfüllhilfe (blaue Komponenten) im Hausmüll entsorgen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr Diabetes-Schulungsteam oder an das Accu-Chek Kunden Service Center.