

إجراء قياس السكر في الدم



إدخال أشرطة الاختبار

أدخل أشرطة الاختبار في مكان إدراج أشرطة الاختبار في اتجاه السهم. عند قيامك بتشغيل الجهاز قبل ذلك، فإنك تقوم بتنشيط الإضاءة آلياً.




خلع أشرطة الاختبار

ادفع أشرطة الاختبار من الأمام أو من الخلف بضغطة خفيفة تجاه الأعلى. يحظر مس أي جزء من أجزاء أشرطة الاختبار سوى الجانب العلوي.



إخراج أشرطة الاختبار

اخلع أشرطة الاختبار بالضغط على زر إخراج شريط الاختبار أو بنزع شريط الاختبار.

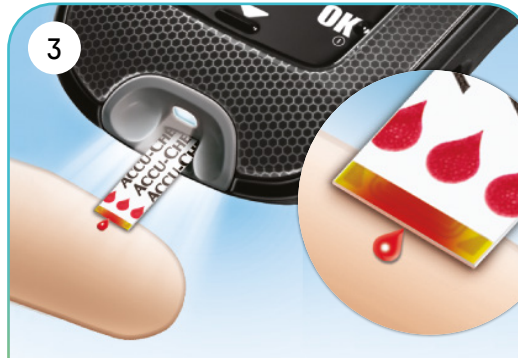

وضع الدم

المس نقطة الدم بالحافة الصفراء لشريط الاختبار وانتظر حتى تظهر "تم إجراء القياس".



المعالجة اللاحقة

إعداد وإزالة أسطوانة المشارط



- 1 حرك الذراع إلى النهاية ناحية الأسفل أولًا، ثم قم بتحريكها مرة أخرى إلى الأعلى.
- 2 عند الإزالة قم بإزالة الغطاء وإخراج الأسطوانة.

أسطوانة غير مستخدمة



أسطوانة مستخدمة



تنبيه: لا تقم بإزالة أسطوانة المشارط، قبل أن يتم استهلاك جميع المشارط بالكامل. وإذا حدث وتمت إزالتها، فلا يمكن استخدامها مرة أخرى لأسباب صحية.

استخراج الدم

ببساطة نقرة واحدة فقط!

نقرة واحدة فقط من أجل الشد والفك



اضغط على زر الإطلاق إلى الأسفل بالكامل، لاستخراج الدم.

التحضير

تركيب أسطوانة المشارط



- 1 اخلع الغطاء
- 2 إدخال الأسطوانة
- 3 تركيب الغطاء



أدر الغطاء حتى يكون عمق الوخز المطلوب عند العلامة.