

## إجراء قياس السكر في الدم



### إدخال أشرطة الاختبار

أدخل أشرطة الاختبار في مكان إدراج أشرطة الاختبار في اتجاه السهم. عند قيامك بتشغيل الجهاز قبل ذلك، فإنك تقوم بتنشيط الإضاءة آليًا.




### خلع أشرطة الاختبار

ادفع أشرطة الاختبار من الأمام أو من الخلف بضغطة خفيفة تجاه الأعلى. يحظر مس أي جزء من أجزاء أشرطة الاختبار سوى الجانب العلوي.



### إخراج أشرطة الاختبار

اخلع أشرطة الاختبار بالضغط على زر إخراج شريط الاختبار أو بنزع شريط الاختبار.

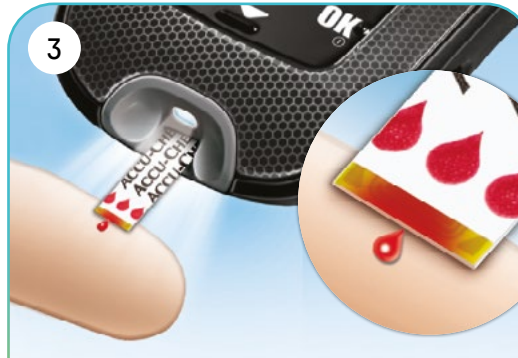

### وضع الدم

المس نقطة الدم بالحافة الصفراء لشريط الاختبار وانتظر حتى تظهر "تم إجراء القياس".



## المعالجة اللاحقة

إعداد وإزالة أسطوانة المشارط



- 1 حرك الذراع إلى النهاية ناحية الأسفل أولًا، ثم قم بتحريكها مرة أخرى إلى الأعلى .
- 2 عند الإزالة قم بإزالة الغطاء وإخراج الأسطوانة.

أسطوانة غير مستخدمة



أسطوانة مستخدمة



تنبيه: لا تقم بإزالة أسطوانة المشارط، قبل أن يتم استهلاك جميع المشارط بالكامل. وإذا حدث وتمت إزالتها، فلا يمكن استخدامها مرة أخرى لأسباب صحية.

## استخراج الدم

ببساطة نقرة واحدة فقط!

نقرة واحدة فقط من أجل الشد والفك



اضغط على زر الإطلاق إلى الأسفل بالكامل، لاستخراج الدم.

## التحضير

تركيب أسطوانة المشارط



- 1 اخلع الغطاء
- 2 إدخال الأسطوانة
- 3 تركيب الغطاء



أدر الغطاء حتى يكون عمق الوخز المطلوب عند العلامة.