

Извършване на измерване на кръвната захар



1

Взимане на тестова лента


С лек натиск избухайте тестовата лента отпред и отзад нагоре. При тази тестова лента можете да докосвате и горната страна.



2

Вкарване на тестова лента

Вкарайте тестовата лента по посока на стрелката в отвора за вкарване на тестови ленти. Ако преди това включвате уреда, активирайте автоматично осветлението.

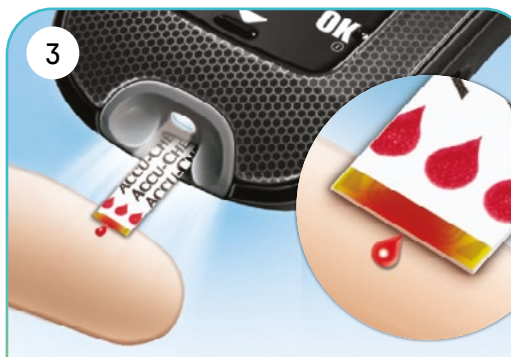

3

Нанасяне на кръв

Докоснете с жълтия ръб на тестовата лента капката кръв и изчакайте, докато се появи „Извършва се измерване“.



4

Изхвърляне на тестовата лента

Свалете тестовата лента, като натиснете копчето за изкарване или като изтеглите тестовата лента.

Подготовка

Поставяне на ланцетния барабан



- 1 Изтеглете капачето
- 2 Вкарайте барабана
- 3 Поставете капачето



Завъртете капачето, докато маркировката не застане до желаната дълбочина на пробиване.

Взимане на кръв

Просто едно щракване!



Натиснете копчето за активиране докрай надолу, за да вземете кръв.

Последваща обработка

Подготвяне и сваляне на ланцетния барабан



- 1 Преместете лоста докрай първо надолу, след това отново нагоре.
- 2 При свалянето изтеглете капачето и изтеглете барабана.

Неизползван барабан



Исползван барабан



Внимание: Не сваляйте ланцетния барабан, преди всички ланцети да са поставени. След като се свали, барабанът не бива да се поставя отново поради съображения за хигиена.