

### Извършване на измерване на кръвната захар



1

#### Взимане на тестова лента


С лек натиск избухайте тестовата лента отпред и отзад нагоре. При тази тестова лента можете да докосвате и горната страна.



2

#### Вкарване на тестова лента

Вкарайте тестовата лента по посока на стрелката в отвора за вкарване на тестови ленти. Ако преди това включвате уреда, активирайте автоматично осветлението.

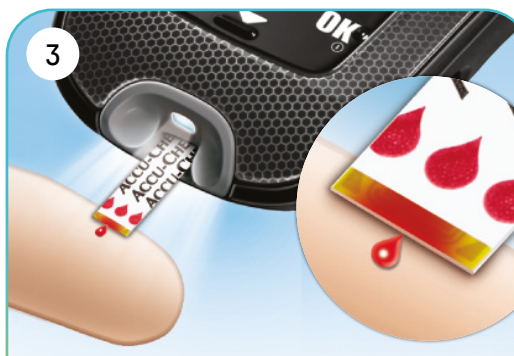

3

#### Нанасяне на кръв

Докоснете с жълтия ръб на тестовата лента капката кръв и изчакайте, докато се появи „Извършва се измерване“.



4

#### Изхвърляне на тестовата лента

Свалете тестовата лента, като натиснете копчето за изкарване или като изтеглите тестовата лента.

## Подготовка

Поставяне на ланцетния барабан




1 Изтеглете капачето



2 Вкарайте барабана



3 Поставете капачето

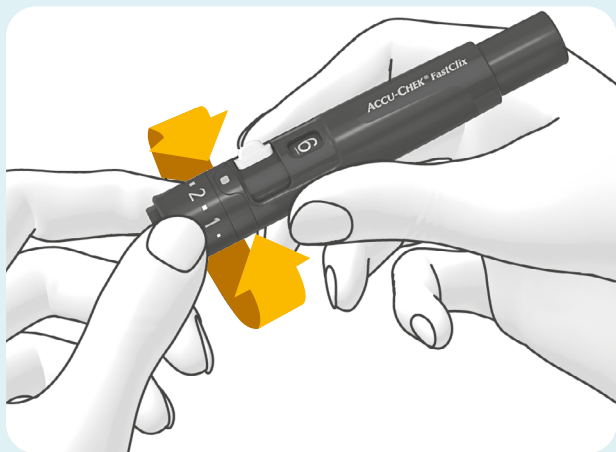

Завъртете капачето, докато маркировката не застане до желаната дълбочина на пробиване.

## Взимане на кръв

Просто едно щракване!

Само едно щракване за затягане и разхлабване




Натиснете копчето за активиране докрай надолу, за да вземете кръв.

## Последваща обработка

Подготвяне и сваляне на ланцетния барабан



1 Преместете лоста докрай първо надолу, след това отново нагоре.

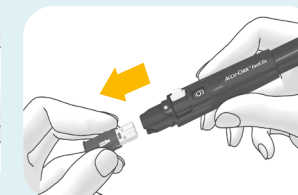

2 При свалянето изтеглете капачето и изтеглете барабана.

Неизползван барабан



Исползван барабан



**Внимание:** Не сваляйте ланцетния барабан, преди всички ланцети да са поставени. След като се свали, барабанът не бива да се поставя отново поради съображения за хигиена.