

Durchführen einer Blutzuckermessung



1

Teststreifen entnehmen


Schieben Sie von vorne oder von hinten einen Teststreifen mit leichtem Druck nach oben. Bei diesem Teststreifen dürfen Sie auch die obere Seite berühren.



2

Teststreifen einführen

Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung in den Teststreifeneinschub ein. Wenn Sie das Gerät vorher einschalten, aktivieren Sie automatisch die Beleuchtung.

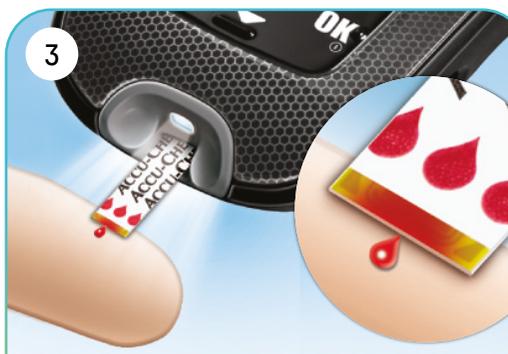

3

Blut auftragen

Berühren Sie mit dem gelben Rand des Teststreifens den Blutstropfen und warten Sie bis „Messung wird durchgeführt“ erscheint.



4

Teststreifen auswerfen

Entfernen Sie den Teststreifen, indem Sie den Teststreifen-Auswurfknopf betätigen oder den Teststreifen herausziehen.

Vorbereitung

Lanzettentrommel einsetzen



- 1 Kappe abziehen
- 2 Trommel einführen
- 3 Kappe aufsetzen




Drehen Sie die Kappe bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht.

Blutgewinnung

Einfach nur 1 Klick!


Nur 1 Klick
zum Spannen
und Auslösen

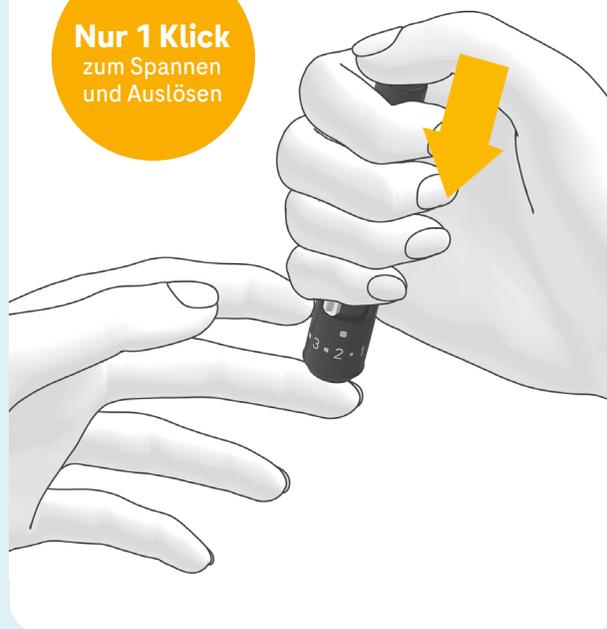

Drücken Sie den Auslöseknopf vollständig nach unten, um Blut zu entnehmen.

Nachbereitung

Lanzettentrommel bereitstellen und entfernen

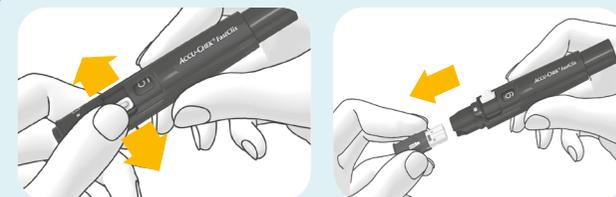

- 1 Hebel bis zum Anschlag erst nach unten, danach wieder nach oben bewegen.
- 2 Bei der Entfernung Kappe ab- und Trommel herausziehen.

Unbenutzte
Trommel



Benutzte
Trommel



Achtung: Lanzettentrommel nicht entfernen, bevor alle Lanzetten aufgebraucht sind. Einmal entfernt, kann die Trommel aus hygienischen Gründen nicht wieder eingesetzt werden.