


Durchführen einer Blutzuckermessung

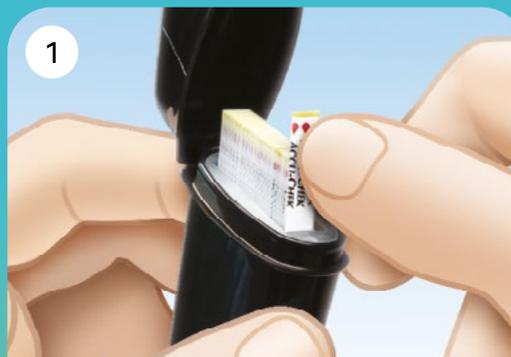

Teststreifen entnehmen

Schieben Sie von vorne oder von hinten einen Teststreifen mit leichtem Druck nach oben. Bei diesem Teststreifen dürfen Sie auch die obere Seite berühren.



Teststreifen einführen

Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung in den Teststreifeneinschub ein. Wenn Sie das Gerät vorher einschalten, aktivieren Sie automatisch die Beleuchtung.



Blut auftragen

Berühren Sie mit dem gelben Rand des Teststreifens den Blutstropfen und warten Sie bis „Messung wird durchgeführt“ erscheint.



Teststreifen auswerfen

Entfernen Sie den Teststreifen, indem Sie den Teststreifen-Auswurfknopf betätigen oder den Teststreifen herausziehen.

Vorbereitung

Lanzettentrommel einsetzen



- 1 Kappe abziehen
- 2 Trommel einführen
- 3 Kappe aufsetzen



Drehen Sie die Kappe bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht.

Blutgewinnung

Einfach nur 1 Klick!



Drücken Sie den Auslöseknopf vollständig nach unten, um Blut zu entnehmen.

Nachbereitung

Lanzettentrommel bereitstellen und entfernen



- 1 Hebel bis zum Anschlag erst nach unten, danach wieder nach oben bewegen.
- 2 Bei der Entfernung Kappe ab- und Trommel herausziehen.

Unbenutzte Trommel



Benutzte Trommel



Achtung: Lanzettentrommel nicht entfernen, bevor alle Lanzetten aufgebraucht sind. Einmal entfernt, kann die Trommel aus hygienischen Gründen nicht wieder eingesetzt werden.