

Préparation

Insertion de la cartouche de lancettes



- 1 Retirez l'embout
- 2 Introduisez la cartouche
- 3 Remettez l'embout



Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque.

Prélèvement sanguin

En un seul clic !

Un seul clic
pour armer et
déclencher



Enfoncez le bouton de déclenchement pour obtenir une goutte de sang.

Élimination

Déverrouillage et retrait de la cartouche de lancettes



- 1 Poussez le bouton-poussoir vers le bas, puis faites-le remonter.
- 2 Retirez l'embout pour sortir la cartouche.

Cartouche non utilisée



Cartouche utilisée



Attention: Ne retirez pas la cartouche de lancettes avant d'avoir utilisé toutes les lancettes. Une fois retirée, la cartouche ne peut plus être réinsérée pour des raisons d'hygiène.