

Réalisation d'une mesure de glycémie



1

Retrait d'une bandelette réactive


Faites glisser une bandelette réactive à l'avant ou à l'arrière en exerçant une légère pression vers le haut. Vous pouvez aussi toucher l'extrémité supérieure de cette bandelette réactive.



2

Insertion d'une bandelette réactive

Introduisez la bandelette réactive dans la fente d'insertion en suivant le sens de la flèche. Si le lecteur est éteint, il s'allumera automatiquement, l'éclairage est automatiquement activé.

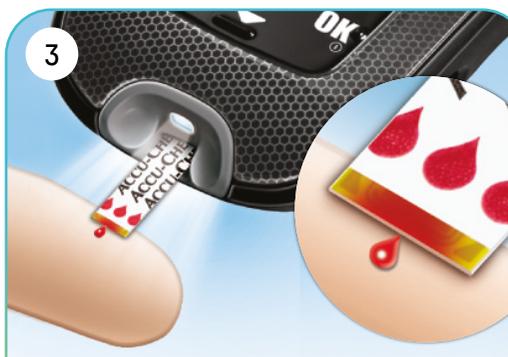

3

Application de la goutte de sang

Mettez la goutte de sang en contact avec le bord jaune de la bandelette réactive et attendez l'affichage du message « Mesure en cours ».



4

Éjection d'une bandelette réactive


Retirez la bandelette réactive en pressant le bouton d'éjection ou en la sortant manuellement.

Préparation

Insertion de la cartouche de lancettes



- 1 Retirez l'embout
- 2 Introduisez la cartouche
- 3 Remettez l'embout

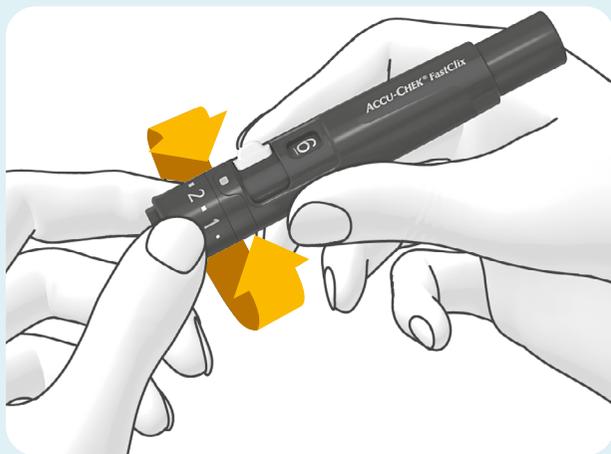

Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque.

Prélèvement sanguin

En un seul clic !


Un seul clic
pour armer et
déclencher



Enfoncez le bouton de déclenchement pour obtenir une goutte de sang.

Élimination

Déverrouillage et retrait de la cartouche de lancettes

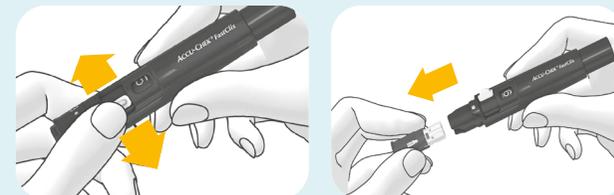

- 1 Poussez le bouton-poussoir vers le bas, puis faites-le remonter.
- 2 Retirez l'embout pour sortir la cartouche.

Cartouche non utilisée



Cartouche utilisée



Attention: Ne retirez pas la cartouche de lancettes avant d'avoir utilisé toutes les lancettes. Une fois retirée, la cartouche ne peut plus être réinsérée pour des raisons d'hygiène.