

### Διεξαγωγή μέτρησης γλυκόζης αίματος



1

#### Αφαίρεση της ταινίας μέτρησης


Σπρώξτε μια ταινία μέτρησης από την μπροστινή ή την πίσω πλευρά με ελαφριά πίεση προς τα πάνω. Δεν πρέπει να αγγίζετε την επάνω πλευρά αυτής της ταινίας μέτρησης.



2

#### Εισαγωγή της ταινίας μέτρησης

Εισάγετε την ταινία μέτρησης στην κατεύθυνση του βέλους μέσα στην υποδοχή ταινίας μέτρησης. Εάν έχετε ενεργοποιήσει προηγουμένως τη συσκευή, ο φωτισμός ενεργοποιείται αυτόματα.

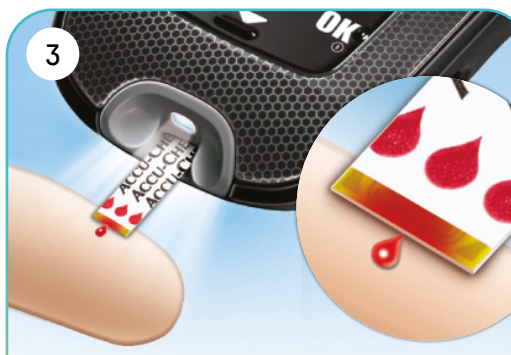

3

#### Τοποθέτηση δείγματος αίματος

Αγγίξτε με την κίτρινη άκρη της ταινίας μέτρησης τη σταγόνα αίματος και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Πραγματοποιείται μέτρηση".



4

#### Εξαγωγή της ταινίας μέτρησης

Αφαιρέστε την ταινία μέτρησης πατώντας το κουμπί εξαγωγής ταινίας μέτρησης ή τραβώντας την ταινία μέτρησης.

## Προετοιμασία

Τοποθέτηση του φυσιγγίου βελονών



1 Αφαιρέστε το καπάκι



2 Εισάγετε το φυσίγγιο



3 Τοποθετήστε το καπάκι



Στρίψτε το καπάκι μέχρι να φθάσει στην ένδειξη του επιθυμητού βάθους τρυπήματος.

## Λήψη αίματος

Μόνο με 1 κλικ!

**Μόνο 1 κλικ**  
για όπλιση και  
απελευθέρωση




Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης προς τα κάτω μέχρι το τέρμα, για να κάνετε λήψη αίματος.

## Παρακολούθηση

Παροχή και αφαίρεση του φυσιγγίου βελονών



1 Μετακινήστε τον μοχλό μέχρι το τέρμα πρώτα προς τα κάτω, στη συνέχεια ξανά προς τα πάνω.

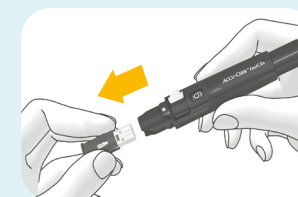

2 Για την αφαίρεση, βγάλτε το καπάκι και τραβήξτε προς τα έξω το φυσίγγιο.

Αχρησιμοποίητο φυσίγγιο



Χρησιμοποιημένο φυσίγγιο

**Προσοχή:** Μην αφαιρέσετε το φυσίγγιο βελονών εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως όλες οι βελόνες. Αφού αφαιρεθεί, το φυσίγγιο βελονών δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για λόγους υγιεινής.