


## Come si misura la glicemia




### 1 Estrazione della striscia reattiva

Con una leggera pressione, spingere verso l'alto una striscia reattiva dalla parte anteriore o posteriore. È possibile toccare anche il lato superiore di questa striscia reattiva.

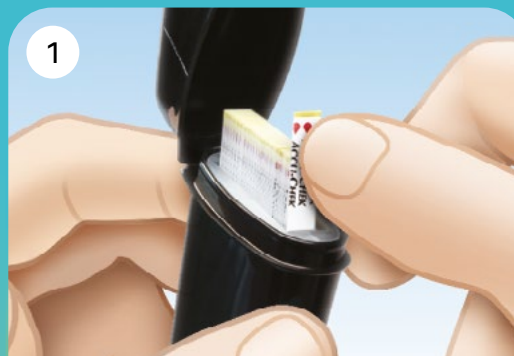

### 2 Inserimento della striscia reattiva

Inserire la striscia reattiva nella rispettiva guida nel senso indicato dalla freccia. Se lo strumento è spento, si accenderà automaticamente.

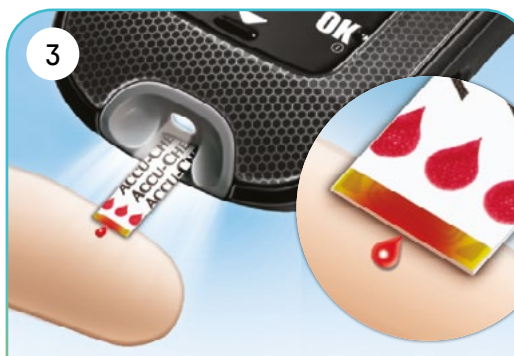

### 3 Applicazione del sangue

Toccare il margine giallo della striscia reattiva con la goccia di sangue e attendere che compaia il messaggio "Misurazione in corso".



### 4 Espulsione della striscia reattiva

Rimuovere la striscia reattiva premendo il pulsante di espulsione della striscia reattiva oppure estraendola direttamente.

## Procedura preliminare

Inserimento del caricatore di lancette



1 Staccare il cappuccio



2 Inserire il caricatore



3 Applicare il cappuccio



Ruotare il cappuccio fino a raggiungere la profondità di puntura desiderata, indicata sulla scala.

## Prelievo di sangue

Basta 1 solo clic!

1 solo clic  
per caricare  
e attivare



Premere completamente verso il basso il pulsante di attivazione per eseguire il prelievo di sangue.

## Procedura finale

Preparazione e rimozione del caricatore di lancette



1 Spostare la levetta fino all'arresto, prima verso il basso, poi di nuovo verso l'alto.



2 Staccare il cappuccio e poi estrarre il caricatore.

Caricatore non utilizzato



Caricatore utilizzato



**Attenzione:** Non rimuovere il caricatore di lancette se non sono state utilizzate tutte le lancette. Per motivi igienici, non reinsertare il caricatore di lancette dopo averlo rimosso.