

Come si misura la glicemia




1 Estrazione della striscia reattiva

Con una leggera pressione, spingere verso l'alto una striscia reattiva dalla parte anteriore o posteriore. È possibile toccare anche il lato superiore di questa striscia reattiva.



2 Inserimento della striscia reattiva

Inserire la striscia reattiva nella rispettiva guida nel senso indicato dalla freccia. Se lo strumento è spento, si accenderà automaticamente.

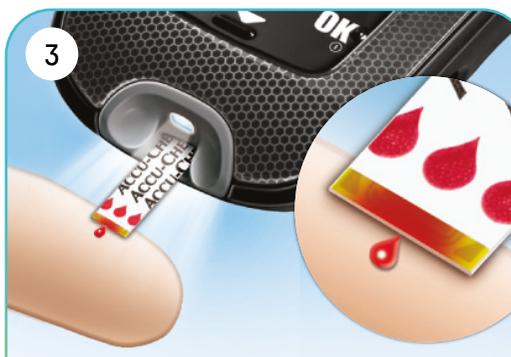

3 Applicazione del sangue

Toccare il margine giallo della striscia reattiva con la goccia di sangue e attendere che compaia il messaggio "Misurazione in corso".



4 Espulsione della striscia reattiva

Rimuovere la striscia reattiva premendo il pulsante di espulsione della striscia reattiva oppure estraendola direttamente.

Procedura preliminare

Inserimento del caricatore di lancette




1 Staccare il cappuccio



2 Inserire il caricatore



3 Applicare il cappuccio

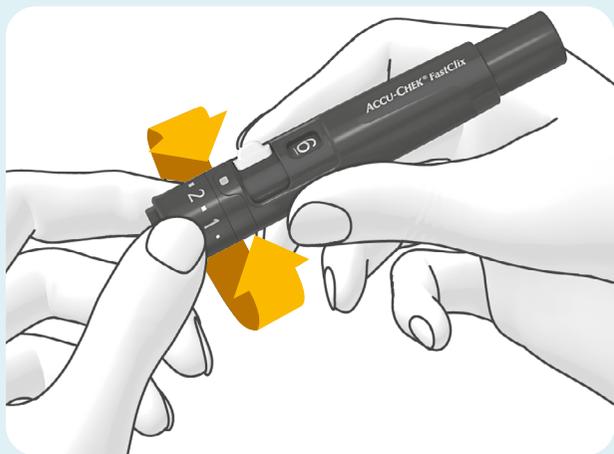

Ruotare il cappuccio fino a raggiungere la profondità di puntura desiderata, indicata sulla scala.

Prelievo di sangue

Basta 1 solo clic!

1 solo clic
per caricare
e attivare



Premere completamente verso il basso il pulsante di attivazione per eseguire il prelievo di sangue.

Procedura finale

Preparazione e rimozione del caricatore di lancette



1 Spostare la levetta fino all'arresto, prima verso il basso, poi di nuovo verso l'alto.



2 Staccare il cappuccio e poi estrarre il caricatore.

Caricatore non utilizzato



Caricatore utilizzato



Attenzione: Non rimuovere il caricatore di lancette se non sono state utilizzate tutte le lancette. Per motivi igienici, non reinserire il caricatore di lancette dopo averlo rimosso.