

Mjerenje šećera u krvi



Tipke za upravljanje izbornikom

Otvor za umetanje test trake

Tipka za uključivanje/isključivanje

Gumb za izbacivanje test trake



1

Vađenje test trake


Povucite test traku prema gore, pritišćući je lagano od naprijed ili straga. Ovu test traku smijete dodirivati i po gornjoj strani.



2

Uvođenje test trake

Test traku u smjeru strelice uvlačite u odgovarajući otvor za umetanje. Ako ste uređaj prethodno uključili, automatski će se aktivirati njegovo osvjjetljenje.

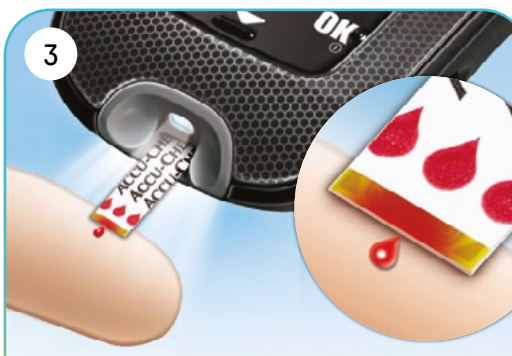

3

Nanošenje krvi

Žutim rubom test trake dodirnite kap krvi i sačekajte dok se ne pojavi poruka „Mjerenje u tijeku“.



4

Izbacivanje test trake

Test traku izvadite iz uređaja tako što ćete pritisnuti gumb za izbacivanje test trake ili izvući test traku.

Priprema za mjerenje

Umetanje bubnja s lancetama



- 1 Skinite poklopac
- 2 Umetnite bubanj
- 3 Stavite poklopac



Okrećite poklopac dok se na pokazivaču ne pojavi željena dubina uboda.

Vađenje krvi

Jednostavno samo 1 klik!

Samo 1 klik
za zatezanje
i okidanje



Do kraja pritisnite gumb za okidanje da izvadite krv.

Nakon mjerenja

Priprema i uklanjanje bubnja s lancetama



- 1 Polugicu pomaknite do graničnika prvo prema dolje pa natrag prema gore.
- 2 Pri uklanjanju, prvo skinite poklopac pa izvadite bubanj.

Nekorišteni
bubanj



Korišteni
bubanj



Pozor: Ne uklanjajte bubanj s lancetama sve dok ne potrošite sve lancete. Kada ga jednom izvadite, bubanj iz higijenskih razloga više ne možete vraćati u uređaj.