

Verrichten van een bloedsuikermeting



1

Teststrip uitnemen


Schuif van voren of van achteren een teststrip met lichte druk omhoog. Bij deze teststrip kunt u ook de bovenzijde aanraken.



2

Teststrip invoeren

Voer de teststrip in de richting van het pijltje in het teststripvakje in. Wanneer u het apparaat eerder inschakelt, activeert u hiermee automatisch de verlichting.

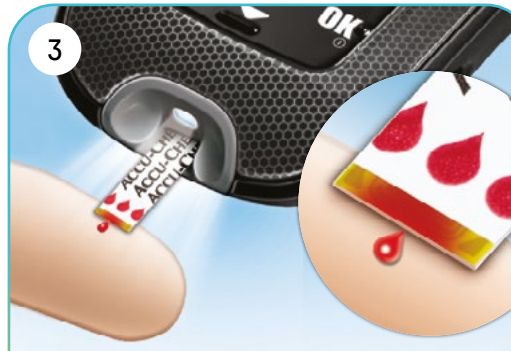

3

Bloed opbrengen

Raak met de gele rand van de teststrip een bloeddruppel aan en wacht tot de melding "Meting wordt verricht" verschijnt.



4

Teststrip uitwerpen


Verwijder de teststrip door de uitwerpknop in te drukken of de teststrip eruit te trekken.

Vorbereitung


Lancethouder inbrengen



1 Kapje afnemen

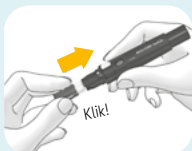

2 Houder invoeren

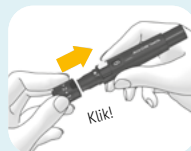

3 Kapje opzetten



Draai de kap tot de gewenste steekdiepte op de markering staat.

Vingerprik

Eenvoudig met 1 klik!

Slechts 1 klik
om te spannen en
vrij te geven




Druk de vrijgaveknop volledig omlaag om bloed af te nemen.

Nabehandeling

Lancethouder uittrekken en verwijderen



1 Trekker tot aan de aanslag eerst naar omlaag, daarna omhoog bewegen.

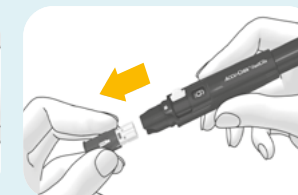

2 Bij de verwijdering het kapje eraf en de houder eruit nemen.

Ongebruikte
houder



Gebruikte
houder



Let op: Lancethouder niet verwijderen voordat alle lancetten opgebruikt zijn. Na verwijdering kan de houder uit hygiënisch oogpunt niet nogmaals worden ingebracht.