

### Verrichten van een bloedsuikermeting



1

#### Teststrip uitnemen


Schuif van voren of van achteren een teststrip met lichte druk omhoog. Bij deze teststrip kunt u ook de bovenzijde aanraken.



2

#### Teststrip invoeren

Voer de teststrip in de richting van het pijltje in het teststripvakje in. Wanneer u het apparaat eerder inschakelt, activeert u hiermee automatisch de verlichting.

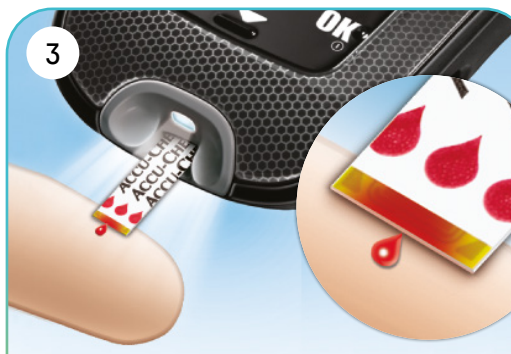

3

#### Bloed opbrengen

Raak met de gele rand van de teststrip een bloeddruppel aan en wacht tot de melding "Meting wordt verricht" verschijnt.



4

#### Teststrip uitwerpen

Verwijder de teststrip door de uitwerpknop in te drukken of de teststrip eruit te trekken.

## Vorbereitung

Lancethouder inbrengen



- 1 Kapje afnemen
- 2 Houder invoeren
- 3 Kapje opzetten



Draai de kap tot de gewenste steekdiepte op de markering staat.

## Vingerprik

Eenvoudig met 1 klik!


**Slechts 1 klik**  
om te spannen en  
vrij te geven



Druk de vrijgaveknop volledig omlaag om bloed af te nemen.

## Nabehandeling

Lancethouder uittrekken en verwijderen

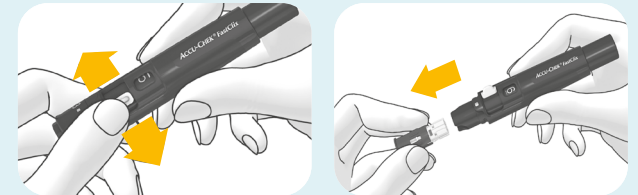

- 1 Trekker tot aan de aanslag eerst naar omlaag, daarna omhoog bewegen.
- 2 Bij de verwijdering het kapje eraf en de houder eruit nemen.

Ongebruikte  
houder



Gebruikte  
houder



**Let op:** Lancethouder niet verwijderen voordat alle lancetten opgebruikt zijn. Na verwijdering kan de houder uit hygiënisch oogpunt niet nogmaals worden ingebracht.