

Wykonywanie pomiaru glukozy we krwi



1

Wyjęcie testu paskowego


Od przodu lub od tyłu wysunąć jeden test paskowy do góry, wywierając lekki nacisk. W przypadku tego testu paskowego można dotykać również górnej strony.



2

Włożenie testu paskowego

Test paskowy włożyć w otwór na testy paskowe w kierunku wskazanym strzałką. Jeśli glukometr będzie wcześniej włączony, oświetlenie aktywuje się automatycznie.

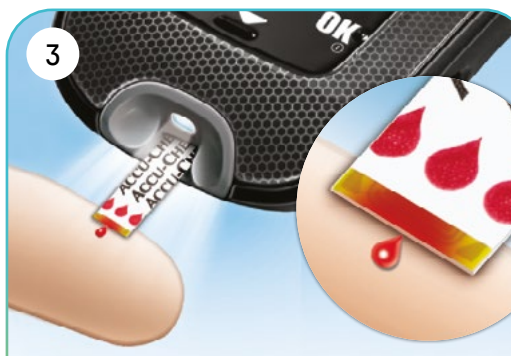

3

Naniesienie krwi

Żółtą krawędzią testu paskowego dotknąć kropli krwi i poczekać, aż pojawi się komunikat „Pomiar w toku”.



4

Wysunięcie testu paskowego

Usunąć test paskowy poprzez uruchomienie przycisku do wysuwania testu paskowego lub wyciągnięcie testu paskowego.

Przygotowanie

Włożenie bębenka z lancetami



- 1 Ściągnąć nasadkę
- 2 Wprowadzić bębenek
- 3 Nałożyć nasadkę



Obracać nasadkę, aż na oznaczeniu będzie widoczna żądana głębokość nakłucia.

Pobranie krwi

Tylko 1 kliknięcie!

**Tylko 1
kliknięcie**
do naciągnięcia
i wyzwolenia
spustu



Przycisk spustowy nacisnąć całkowicie do dołu, aby pobrać krew.

Postępowanie po pobraniu krwi

Udostępnienie i usunięcie bębenka z lancetami



- 1 Poruszyć dźwignię aż do oporu najpierw do dołu, później z powrotem do góry.
- 2 Podczas usuwania ściągnąć nasadkę i wyciągnąć bębenek.

Nieużywany
bębenek



Używany
bębenek



Uwaga: nie usuwać bębenka z lancetami, zanim nie będą zużyte wszystkie lancety. Po usunięciu nie można ponownie włożyć bębenka ze względów higienicznych.