

Fazer o teste da glicemia



Retirar a tira de teste

Aplicando uma ligeira pressão, empurre uma tira de teste de trás ou da frente para cima. Nesta tira de teste pode tocar também na parte de cima.



Inserir a tira de teste

Insira a tira de teste no sentido da seta na ranhura própria para as tiras de teste. Se o aparelho já estiver ligado, a iluminação é ativada automaticamente.



Aplicar o sangue

Toque com a borda amarela da tira de teste na gota de sangue e aguarde até aparecer "Realizando o teste".



Ejetar a tira de teste

Retire a tira de teste pressionando o botão de ejeção ou puxe a tira de teste para fora.

Preparação

Inserir o tambor de lancetas



1 Tirar a tampa



2 Inserir o tambor



3 Colocar a tampa



Rode a tampa até a profundidade de penetração desejada ficar na marcação.

Obter o sangue

Apenas 1 clique!

Apenas
1 clique
para armar e
ativar



Pressione o botão de ativação totalmente para baixo para colher o sangue.

Cuidados posteriores

Providenciar e remover o tambor de lancetas



1 Mover a alavanca até ao encosto, primeiro para baixo e depois novamente para cima.



2 Para a remoção tirar a tampa e puxar o tambor para fora.

Tambor não usado



Tambor usado



Atenção: não retire o tambor de lancetas antes de todas as lancetas estarem gastas. Uma vez retirado, por motivos de higiene o tambor não pode ser inserido novamente.