

## Fazer o teste da glicemia




### Retirar a tira de teste

Aplicando uma ligeira pressão, empurre uma tira de teste de trás ou da frente para cima. Nesta tira de teste pode tocar também na parte de cima.



### Inserir a tira de teste

Insira a tira de teste no sentido da seta na ranhura própria para as tiras de teste. Se o aparelho já estiver ligado, a iluminação é ativada automaticamente.

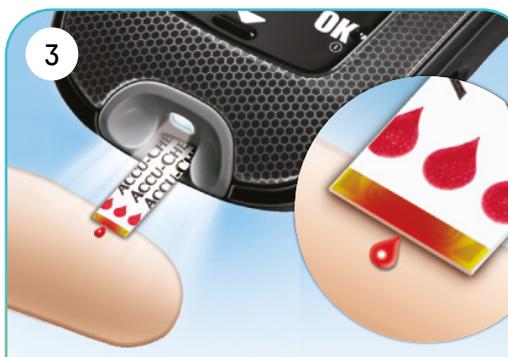

### Aplicar o sangue

Toque com a borda amarela da tira de teste na gota de sangue e aguarde até aparecer "Realizando o teste".



### Ejetar a tira de teste


Retire a tira de teste pressionando o botão de ejeção ou puxe a tira de teste para fora.

## Preparação

Inserir o tambor de lancetas



- 1 Tirar a tampa
- 2 Inserir o tambor
- 3 Colocar a tampa

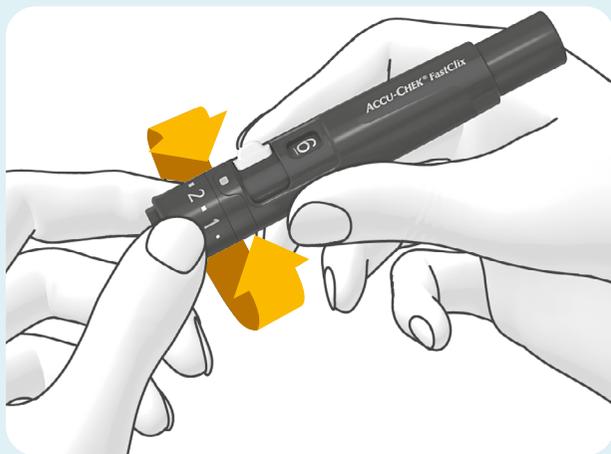

Rode a tampa até a profundidade de penetração desejada ficar na marcação.

## Obter o sangue

Apenas 1 clique!


Apenas  
1 clique  
para armar e  
ativar



Pressione o botão de ativação totalmente para baixo para colher o sangue.

## Cuidados posteriores

Providenciar e remover o tambor de lancetas

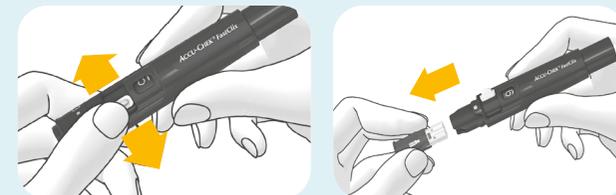

- 1 Mover a alavanca até ao encosto, primeiro para baixo e depois novamente para cima.
- 2 Para a remoção tirar a tampa e puxar o tambor para fora.

Tambor não usado



Tambor usado



**Atenção:** não retire o tambor de lancetas antes de todas as lancetas estarem gastas. Uma vez retirado, por motivos de higiene o tambor não pode ser inserido novamente.