


## Realizarea unei măsurări a glicemiei

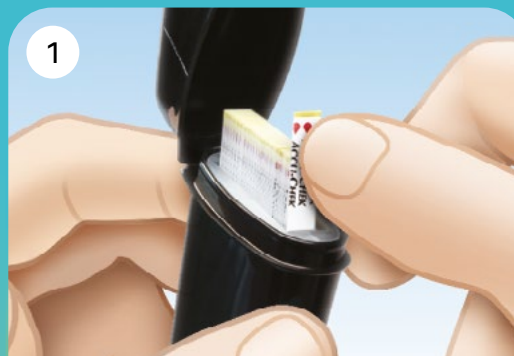

1

### Retrageți banda de test


Împingeți în sus banda de test prinzând-o din partea din față sau din spate cu o presiune ușoară. În cazul acestei benzi de test puteți atinge și partea superioară.



2

### Introduceți banda de test

Introduceți banda de test în fanta pentru benzi de test pe direcția săgeții. Dacă porniți aparatul înainte de acest lucru veți activa automat iluminarea.

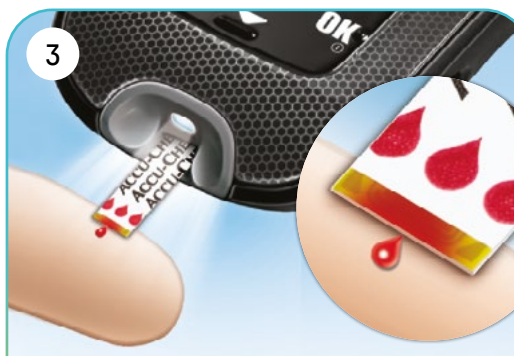

3

### Aplicați sângele

Atingeți picătura de sânge cu marginea galbenă a benzii de test și așteptați până apare „executare măsurătoare”.



4

### Extragerea benzii de test

Îndepărtați banda de test acționând butonul extractor pentru extragerea benzii de test sau extrăgând banda de test.

## Pregătire

Utilizarea dispozitivului de înțepare cu lanțetă



1 Scoateți capacul



2 Introduceți dispozitivul de înțepare



3 Puneți la loc capacul




Rotiți capacul până când pe marcaj apare adâncimea dorită de înțepare.

## Recoltarea sângelui

Pur și simplu doar un clic!

Doar 1 clic  
pentru tensionare  
și declanșare

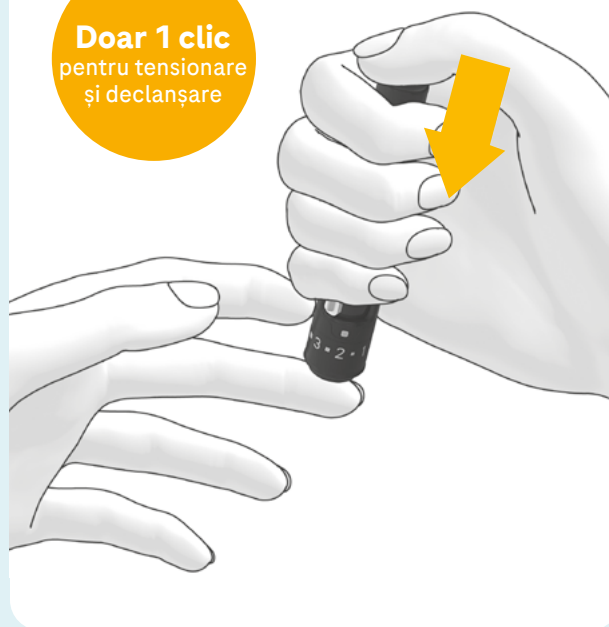

Apăsați butonul de declanșare în totalitate în jos pentru a recolta sânge.

## Procesare

Pregătiți dispozitivul de înțepare cu lanțetă și îndepărtați-l



1 Deplasați maneta până la opritor întâi în jos, apoi din nou în sus.



2 Pentru evacuare scoateți capacul și extrageți dispozitivul de înțepare.

Dispozitiv de înțepare nefolosit



Dispozitiv de înțepare folosit



**Atenție:** nu eliminați dispozitivul de înțepare cu lanțete înainte ca toate lanțetele să fie folosite. Odată îndepărtat, dispozitivul de înțepare nu mai poate fi refolosit din motive de igienă.