

Порядок измерения уровня сахара в крови



1

Извлечь тест-полоску


Выдвиньте тест-полоску спереди или сзади, слегка нажимая сверху. Вы можете прикоснуться к верхней части этой тест-полоски.



2

Ввести тест-полоску

Введите тест-полоску в специальную прорезь в направлении стрелки. Если предварительно включить прибор, автоматически активируется подсветка.

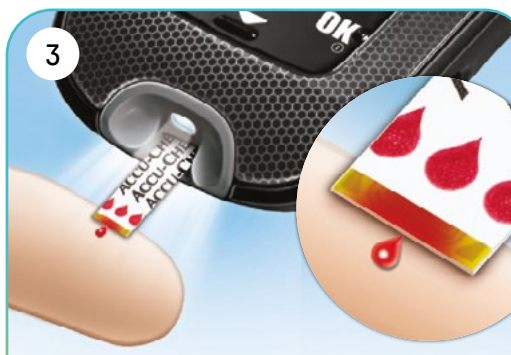

3

Нанести кровь

Слегка коснитесь края капли жёлтым краем тест-полоски и дождитесь, пока появится сообщение „Выполняется измерение“.



4

Удалить тест-полоску

Нажмите на кнопку выброса или вытяните тест-полоску, чтобы удалить её.

Подготовка

Установка барабана с ланцетами



- 1 Снимите колпачок
- 2 Вставьте барабан
- 3 наденьте колпачок



Поверните колпачок так, чтобы отметка указывала нужную глубину прокалывания.

Получение капли крови

Всего 1 нажатие!

Всего 1 нажатие
для взвода и прокалывания



Нажмите на спусковую кнопку до упора, чтобы получить каплю крови.

После использования

Обработка и удаление барабана с ланцетами



- 1 Передвиньте рычаг до упора вниз и затем снова вверх.
- 2 При удалении снимите колпачок и извлеките барабан.

Неиспользованный барабан



Использованный барабан



Внимание! Не удаляйте барабан, пока не будут израсходованы все ланцеты. В целях поддержания гигиены барабан нельзя установить назад после извлечения.