

Merenje šećera u krvi



1

Izvlačenje test trake


Povucite test traku prema gore, pritiskajući je lagano od napred ili od pozadi. Ovu test traku smete da dodirujete i po gornjoj strani.



2

Uvlačenje test trake

Test traku u smeru strelice uvlačite u otvor za ubacivanje. Ako ste uređaj prethodno uključili, automatski će se aktivirati njegovo osvetljenje.

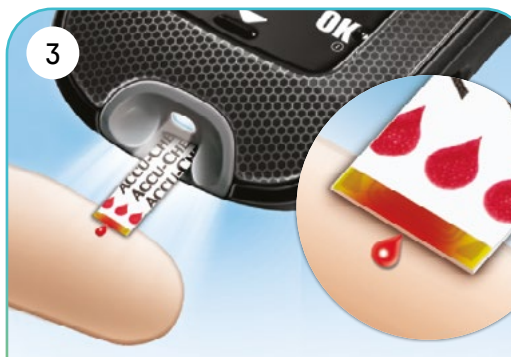

3

Nanošenje krvi

Žutom ivicom test trake dodirnite kap krvi i sačekajte dok se ne pojavi poruka „Merenje u toku“.



4

Izbacivanje test trake

Test traku izvadite iz uređaja tako što ćete pritisnuti dugme za izbacivanje test trake ili izvući test traku.

Priprema za merenje

Umetanje bubnja sa lancetama



- 1 Skinite poklopac
- 2 Ubacite bubanj
- 3 Stavite poklopac



Okrećite poklopac dok se na pokazivaču ne pojavi željena dubina uboda.

Vađenje krvi

Jednostavno samo 1 klik!

Samo 1 klik
za zatezanje
i okidanje



Do kraja pritisnite dugme za okidanje da izvadite krv.

Posle merenja

Postavljanje i uklanjanje bubnja za lancete



- 1 Polugu pomerite do graničnika, prvo naniže i zatim ponovo naviše.
- 2 Pri uklanjanju, prvo skinite poklopac pa izvadite bubanj

Novi bubanj



Korišćeni
bubanj



Pažnja: Ne uklanjajte bubanj sa lancetama sve dok ne potrošite sve lancete. Kada ga jednom izvadite, bubanj iz higijenskih razloga više ne možete vraćati u uređaj.