

Cómo realizar una medición de glucemia



Teclas para la navegación por el menú

Puerto de la tira reactiva

Tecla de encendido/apagado

Botón para expulsar la tira reactiva



1

Sacar la tira reactiva


Deslice hacia arriba la primera o la última tira reactiva aplicando un poco de presión. Puede tocar la parte superior de esta tira reactiva.



2

Introducir la tira reactiva

Introduzca la tira reactiva en el puerto para tiras reactivas en la dirección de la flecha. Si el medidor está apagado, se encenderá automáticamente.

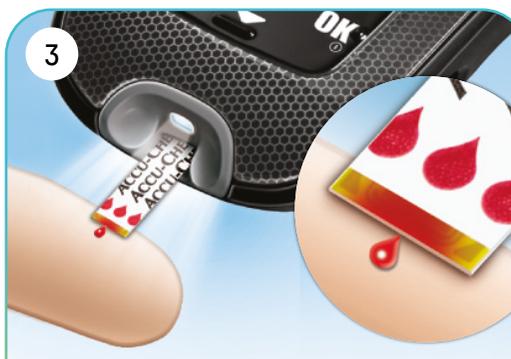

3

Aplicar la sangre

Acerque la gota de sangre al borde amarillo de la tira reactiva y espere hasta que en la pantalla aparezca 'Midiendo'.



4

Expulsar la tira reactiva

Para sacar la tira reactiva pulse el botón de expulsión o tire de ella.

Preparación

Colocar un cartucho de lancetas



- 1 Quite el capuchón
- 2 Introduzca el cartucho
- 3 Coloque el capuchón



Gire el capuchón hasta que en la marca aparezca la profundidad de penetración deseada.

Obtención de la gota

¡Con un simple clic!


Solo 1 clic
para tensar y disparar



Apriete el botón disparador completamente hacia abajo para extraer la sangre.

Preparación para volver a utilizarlo

Preparar el cartucho de lancetas y sacarlo

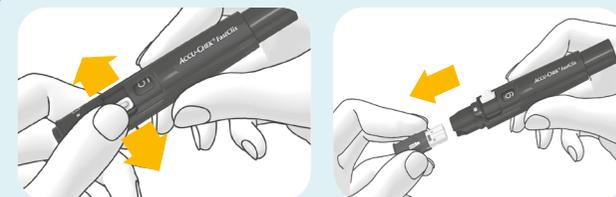

- 1 Gire el botón de resorte hasta el tope moviéndolo primero hacia abajo y luego hacia arriba.
- 2 Para sacar el cartucho de lancetas, quite el capuchón y saque el cartucho.

Cartucho sin usar



Cartucho usado



Atención: Saque el cartucho de lancetas solo cuando haya utilizado todas las lancetas. Después de sacarlo, el cartucho no se puede volver a utilizar por motivos de higiene.