

Accu-Chek Guide birçok şeyi kolaylaştırır.



Ayrıntılı kullanım bilgileri www.accu-chek.de/guide adresindeki ürün videosunda veya ürün paketindeki broşürde verilmiştir.

Kan şekerinin ölçülmesi



Ölçüm çubuğunu çıkarma

Önden veya arkadan bir ölçüm çubuğunu hafifçe bastırarak yukarı doğru itin. Bu ölçüm çubuğunun üst kısmına da dokunabilirsiniz.



Kanı uygulama

Ölçüm çubuğunun sarı ucuyla kan damlasına dokunun ve ekranda "Ölçüm yapılıyor" yazısı belirinceye kadar bekleyin.



Ölçüm çubuğunu yerleştirme

Ölçüm çubuğunu ok işareti yönünde ölçüm çubuğu yuvasına yerleştirin. Eğer önceden cihazı açarsanız, otomatik olarak aydınlatma etkinleşir.



Ölçüm çubuğunu çıkarma

Ölçüm çubuğu çıkarma düğmesine basarak veya ölçüm çubuğunu dışarı çekerek, ölçüm çubuğunu atın.

ACCU-CHEK®

Accu-Chek FastClix. Sadece 1 tık ile kan alın.

Hazırlama

Lanset şarjörünü yerleştirme



1. Kapağı çekerek çıkarın

2. Lanset şarjörünü yerleştirin

3. Kapağı yerine takın



Arzu edilen delme derinliği işaretin karşısına gelinceye kadar kapağı çevirin.

Kan alma

Sadece 1 tık!



Sadece 1 tık ile çekin ve tetikleyin

Kan almak için tetik düğmesini sonuna kadar aşağıya bastırın.

Ölçümden sonra

Lanset şarjörünü hazırlama ve çıkarma



1. Kolu önce sonuna kadar aşağı, sonra tekrar yukarı hareket ettirin.

2. Çıkarırken kapağı çekin ve lanset şarjörünü dışarı çekin.

Kullanılmamış lanset şarjörü



Kullanılmış lanset şarjörü



Dikkat: Lanset şarjörlerini tüm lansetler kullanılmadan çıkarmayın. Bir kez çıkarıldıktan sonra, şarjör hijyenik nedenlerden dolayı tekrar kullanılamaz.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE ve FASTCLIX Roche'un ticari markalarıdır.
© 2018 Roche Diabetes Care. Tüm hakları saklıdır.

Ayrıntılı bilgi için

Accu-Chek Müşteri Hizmetlerimizdeki çalışanlarımız size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Ücretsiz telefon numarası 0800 4466800 (Pazartesi-Cuma, saat 08:00-18:00).

Veya www.accu-chek.de adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz



www.accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

ACCU-CHEK®