

Kan şekerinin ölçülmesi




Ölçüm çubuğunu çıkarma

Önden veya arkadan bir ölçüm çubuğunu hafifçe bastırarak yukarı doğru itin. Bu ölçüm çubuğunun üst kısmına da dokunabilirsiniz.



Ölçüm çubuğunu yerleştirme

Ölçüm çubuğunu ok işareti yönünde ölçüm çubuğu yuvasına yerleştirin. Eğer önceden cihazı açarsanız, otomatik olarak aydınlatma etkinleşir.

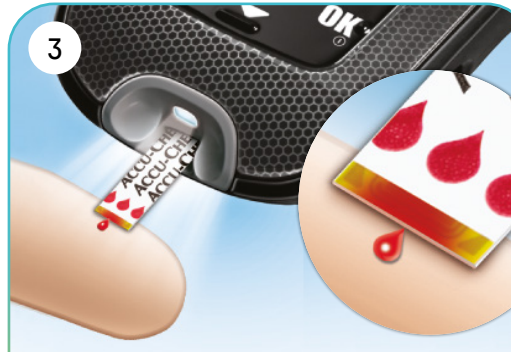

Kanı uygulama

Ölçüm çubuğunun sarı ucuyla kan damlasına dokunun ve ekranda "Ölçüm yapılıyor" yazısı belirinceye kadar bekleyin.



Ölçüm çubuğunu çıkarma


Ölçüm çubuğu çıkarma düğmesine basarak veya ölçüm çubuğunu dışarı çekerek, ölçüm çubuğunu atın.

Hazırlama

Lanset şarjörünü yerleştirme



- 1 Kapağı çekerek çıkarın
- 2 Lanset arjörünü yerleştirin
- 3 Kapağı yerine takın

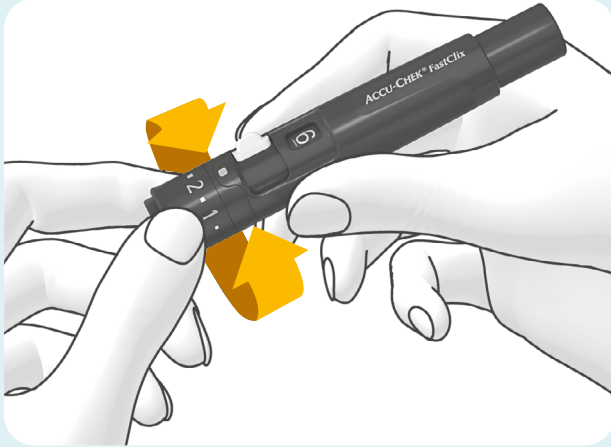

Arzu edilen delme derinliği işaretin karşısına gelinceye kadar kapağı çevirin.

Kan alma

Sadece 1 tık!

**Sadece 1
tık ile
çekin ve
tetikleyin**



Kan almak için tetik düğmesini sonuna kadar aşağıya bastırın.

Ölçümden sonra

Lanset şarjörünü hazırlama ve çıkarma



- 1 Kolu önce sonuna kadar aşağı, sonra tekrar yukarı hareket ettirin.
- 2 Çıkarırken kapağı çekin ve lanset şarjörünü dışarı çekin.

Kullanılmamış
lanset
şarjörü



Kullanılmış
lanset
şarjörü



Dikkat: Lanset şarjörlerini tüm lansetler kullanılmadan çıkarmayın. Bir kez çıkarıldıktan sonra, şarjör hijyenik nedenlerden dolayı tekrar kullanılamaz.